

取扱説明書

Instruction Manual

小児科用カート

navis

LUXE


8-3304-01/02 LX3405PRO/S

8-3304-03/04 LX34PRO-P/B


この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

(LX34PROシリーズは無地仕様)

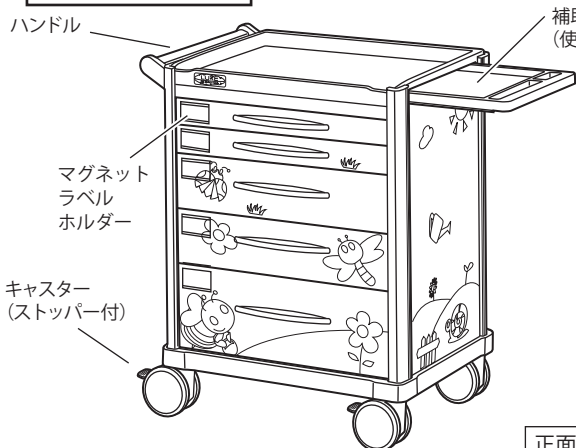


LX3405PRO

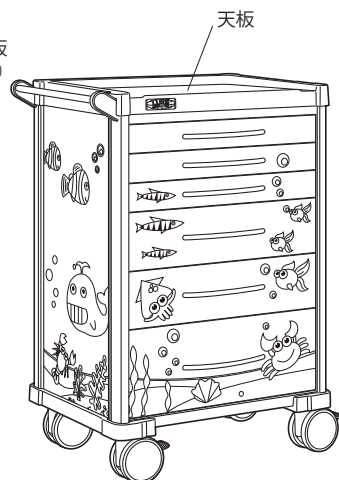

LX3405PROS


正面

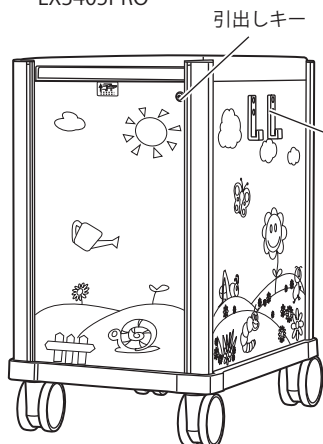

LX3405PRO

蘇生板フック

補助天板
(収納時)

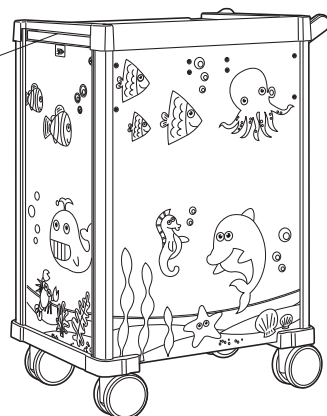

LX3405PROS

側面・背面

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

1. 設置・移動

- ご使用の際は必ずキャスターのストッパーをロックしてください。
- 平らな場所で設置・移動し、急激な段差や傾斜がある場所でのご使用は避けてください。
- 背面を押してカートを動かさないでください。引出しが飛び出す恐れがあります。
- キャスターをロックした状態でカートを動かさないでください。
- エレベーターなどの乗降の際にはキャスターが落ちないようにご注意ください。
- 水のかかる場所でのご使用は避けてください。さびの発生や故障の原因となります。

2. 施錠

- 施錠状態にしたまま引出しを閉めないでください。錠前のかかり部を破損することがあります。
- 鍵を差し込んだままにしないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。使用後は必ず鍵を抜いてください。
- 曲がった状態の鍵を鍵穴に無理に差し込まないでください。鍵の先端部分が折れて、鍵穴から抜ける場合があります。
- スペアキーは施錠後の鍵の紛失に備えて別のところに保管してください。万一鍵を紛失した場合は、錠穴部の番号を販売店までご連絡ください。有償にて対応いたします。

3. 引出し

- 施錠してから、移動させてください。引出しが飛び出してけがをすることがあります。
- 引出しを開閉する際には指などを挟まぬよう、取っ手を持って開閉してください。けがをすることがあります。
- 引出しをいっぱいに引き出すと、抜け落ちてけがや破損する場合があります。
- 安全のため引出しは同時に複数段引き出さないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 引出し・天板などそれぞれ耐荷重が異なりますので耐荷重を超えないようご注意ください。

4. 天板・本体

- 天板は樹脂製ですので、強い衝撃を与えると割れてけがをすることがあります。
 - 天板の上に重量物を載せたり、人が乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
 - ネジがしっかり締められているか定期的に確認してください。
 - 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
 - がたつきや異音が発生した場合など、異常があった場合は使用を中止してください。本体が壊れてけがをすることがあります。
 - 本体・引出しなどに薬品などが付着したらすぐに拭き取ってください。長時間放置すると変色する恐れがあります。
 - 直射日光やストーブの熱などが直接当たらないようにしてください。変形、変色の原因となります。
 - 補助天板・引出しを出したまま移動させないでください。けがをすることがあります。
-


特長

- デザイン・機能性に優れた頑丈なスチール製カートです。
- 引出しが閉まるときの衝撃を解消するソフトクロー징機構を採用しています。
- 引出しが全て引き出せるため、収納物が見やすく、出し入れしやすいです。
- 右側面の引出しキーをロックすると、全ての引出しがロックできます。
- 補助天板を引き出す事で、作業スペースが広がります。


付属品取付け方法

◆仕切り板


1. ストリップを引出しにセットします。

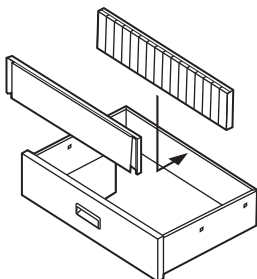


2. タテとヨコの仕切り板を組み合わせます。

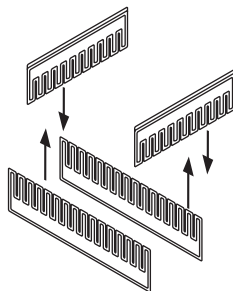

3. 仕切り板を引出しにセットします。

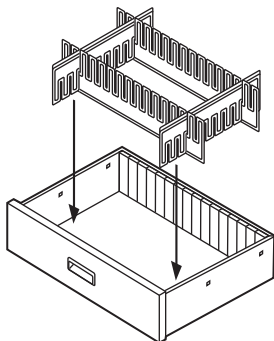


完成図

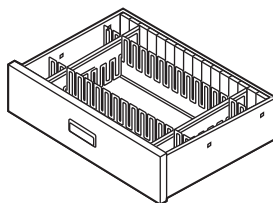

◆ネジキャップ


背面のネジ穴にネジキャップを取り付けてください。

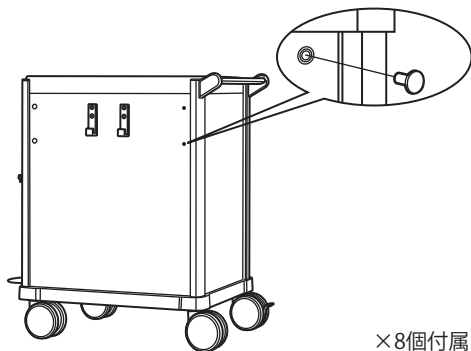

×8個付属

◆蘇生板振動防止用クッション（EVA）

蘇生板を使用する時、背面に取り付けてください。

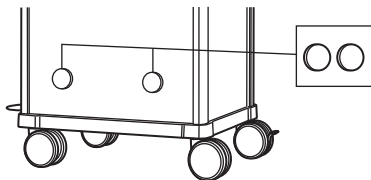

×2個付属

お手入れ方法

- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。
その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- 漂白剤やクレンザーは樹脂や引出しなどを傷めるので、使用しないでください。

定期点検

- ハンドルのネジがしまっているか定期的に確認してください。

オプション

品番	型番	品名	仕様	材質	入数
8-1341-11	VCPR	蘇生板	440×510×10mm	PMMA (メタクリル樹脂)	1枚
8-1341-22	VIV	I V スタンド	全長710~1225mm	スチール	1式
8-1341-14	X-FD3	仕切板 (上段用・横)	542×51×4.6mm	AS樹脂	1枚
8-1341-15	X-SD3	仕切板 (上段用・縦)	368×51×4.6mm	AS樹脂	1枚
8-1341-16	X-FD6	仕切板 (中段用・横)	452×130×4.6mm	AS樹脂	1枚
8-1341-17	X-SD6	仕切板 (中段用・縦)	257×130×4.6mm	AS樹脂	1枚
8-1341-18	P-FD3	仕切板セット 上段用	タテ・ヨコ各3枚 ストリップ2個	仕切板／AS樹脂 ストリップ／ABS樹脂	1 セット
8-1341-19	P-FD6	仕切板セット 中段用	タテ・ヨコ各2枚 ストリップ2個	仕切板／AS樹脂 ストリップ／ABS樹脂	1 セット

仕様

品番	型番	サイズ	仕様	重量
8-3304-01／02	LX3405PRO／PRO-S	690×540×930mm (ハンドル含まず)	イラスト入り	65kg
8-3304-03／04	LX34PRO-P／B		無地	

引出し上段	内寸／ 569×398×75.5mm	耐荷重10kg
引出し中段	内寸／ 569×398×154.5mm	耐荷重10kg
引出し下段	内寸／ 569×398×233.5mm	耐荷重10kg
天板	有効寸法590×420mm	耐荷重8kg
補助天板	有効寸法350×380mm	耐荷重5kg
キャスター	φ125mm 双輪・前2輪ストッパー	
付属品	上段・中段仕切り板セット×各1セット、マグネットラベルホルダー×6枚 鍵×2本、ネジキャップ×8個	

Made in TAIWAN

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	小児科用カート
型 式	LX3405PRO ・ LX34PRO
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社