


# 座付きカート 91301J

CODE 0-9851-11

当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

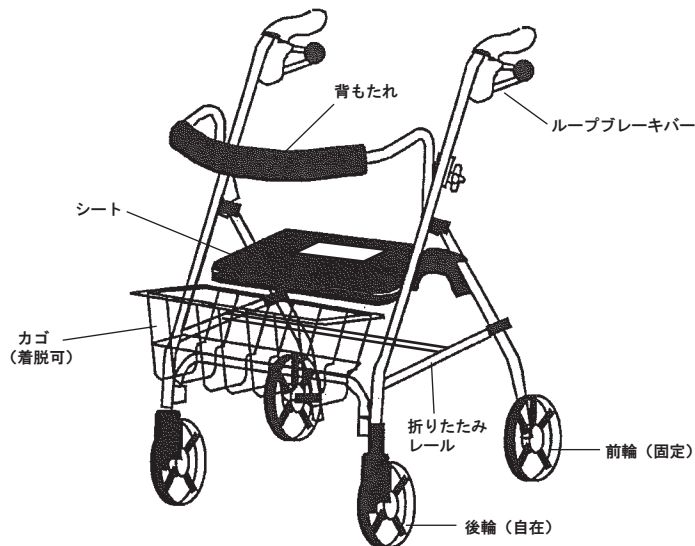

## 組立方法

ハンドル部パイプを本体パイプに差込み、適当な高さに調整した後、ねじを締めしっかりと取り付けます。ハンドル部パイプは、十分な長さ本体パイプへ入れてください。

## ブレーキの操作方法

※ブレーキ力は、タイヤの減り具合によって変わります。

ハンドルブレーキ：ハンドル下のループブレーキレバーを握っている間、ブレーキが利きます。歩行中に使用するのに有効です。(図1)

ループブレーキ：ループブレーキレバーをしっかりと下げると、ブレーキが固定します。シートボードに腰掛けるときに使用します。(図2)

ループブレーキ(解除)：ループブレーキレバーを引き上げると、ブレーキは解除されます。(図3)

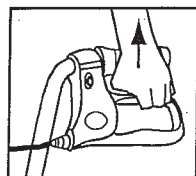


図1

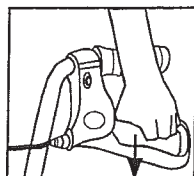


図2

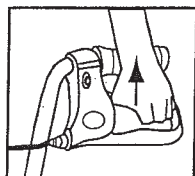


図3

## ご使用の前に・操作方法

ご使用になる前に、ハンドルグリップ下のレバーがしっかりと締まっているか確認してください。また、左右のハンドルの高さが同じか確認してください。

歩行器を前へ押すときは、ハンドルグリップを真っ直ぐにして歩行してください。ハンドルグリップが曲がった方向で強く押し出すと、転倒する危険があります。

シートボードに座る時は、平坦で硬い地面の上に歩行器を置き、ループブレーキレバーを下ろしてブレーキを固定します。歩行器が安定して、滑らない事を確認してから腰掛けてください。座面に対し、垂直に腰掛けて下さい。転倒する危険があるので、決して斜めに座らないでください。

## お手入れと保管方法

- 湿らせた柔らかい布に中性洗剤を含ませ、フレームと車輪を拭きます。その後乾かしてください。
- 直射日光のあたる場所、ストーブの周囲など高温になる場所、湿気の多い場所または雨のあたる場所には保管しないでください。

## 安全上の注意

- 歩行補助以外の目的でご使用にならないでください。
- 本製品に異常が認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ご使用になるときは、毎回レバーがしっかりと固定されているか確認してください。また、ハンドルの向きが本体に対して垂直になるように固定してください。
- 本製品は、硬くて平坦な場所でのみご使用ください。
- 歩行中は左右のハンドルグリップを握って操作してください。バランスを崩して怪我をする恐れがあります。
- ハンドルブレーキをかけるときは、両方をゆっくり握ってください。
- 停止するときは、ループブレーキをかけてください。
- 凍結、積雪、濡れている場所では使用しないでください。ブレーキの利きが悪くなり、大変危険です。
- 過剰に過重しないでください。最大荷重は10kgです。
- 腰掛ける場合は、ループブレーキをかけてから垂直に座ってください。斜めに腰掛けたり、もたれるとバランスを崩し転倒する恐れがありますのでおやめください。

## 保証規定

- ・ 正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より1年間 無償修理致します。
- ・ 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - 本品納入後の移動や輸送等による落下による故障。
  - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - 接続している他の機器が原因による故障。
  - 車両・船舶等での使用による故障。
  - 消耗部品、付属部品の交換。
  - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ・ ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により発生される損害は、ご容赦頂きます。
- ・ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理致します。

品 名	座付きカート
型 式	91301J
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月
お 名 前	
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当
住 所	TEL.

● 商品に関するお問い合わせは、弊社「カスタマー相談センター」のフリーダイヤルにお電話ください。

カスタマー  
相談センター  
0120-711-875  
0120-700-763

受付時間  
9:00~12:00・13:00~17:30  
(土・日・祝祭日及び当社休業日は除く)

アズワン株式会社  
第2版2014年6月作成