

ディスク緊急用カッター
Code NO:8-7393-01
MODEL: ZD-SF-501

注意:

本品は以下の用途や使用方法等を守ってお使いください。
本品は使い捨てタイプです。一度ご使用後の再使用はお止め下さい。

用途:

緊急救助で負傷者を救出する際、負傷者を留めているベルトの切断や負傷者を覆っているカバー等の除去に用います。

使用方法:

- ①使用する前に、刃の部分に邪魔になるワイヤーやホースなどが無いことを確認します。
- ②切断する対象物を固定します。
- ③本体のフック部を切断部の端にはめ込み、切断方向に引っ張ります。

保管環境:

腐食性ガスがなく、風通しのいい場所で保管ください。
保管温度(4℃~40℃)、保管湿度(相対湿度85%以下)

製品仕様:

長さ 約208mm、幅 約70mm、刃の厚み 0.2mm以上

LOT:*****



4 580110 271706

販売元: アズワン株式会社

AS ONE CORPORATION

MADE IN CHINA