

取扱説明書


オムツ交換車		(0-339-01)
オムツ交換車	SJ-25	(0-1299-01)
オムツ交換車	SO-230	(0-1299-02)

特徴

- 院内で手軽にオムツ交換や移動ができ、収納に便利な棚やバスケット等が付いています。
- 使用済みオムツ等の処理用のビニール製帆布ダストボックスが付いています。
- 汚れ物の区別がし易いポリダスターが2個付いています。(SJ-25, SO-230)

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 付属品のポリダスターやビニール帆布は専用品をご使用下さい。専用品以外の物は保持することが出来ません。
- ⑤ ビニール帆布の装着は取付用パイプにボタンで確実に装着して下さい。
- ⑥ ポリダスターは2本の取付用金具の間にしっかりと固定して下さい。取付用金具が緩い場合は両側から押しすぼめて下さい。(SJ-25, SO-230)
- ⑦ 引出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。抜け落ちる恐れがあります。(SJ-25, SO-230)
- ⑧ 引出し等を出したままの移動は大変危険ですのでしないで下さい。
- ⑨ バスケットを取り扱う際は落下しないようにご注意下さい。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル	 0120-711-875	
	F A X 0120-700-763	
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		