

組立説明書

品名

注射台

適用機種

NVS-1A・NVS-2A・NVL-1A・NVL-2A

組立て上の注意

- ※組立てる前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組立てて下さい。
- ※組立てる前に、部品の数量を確認して下さい。
- ※組立て作業は、2人以上で行って下さい。
- ※本製品は、スチール製部品がありますので、組立てる際には手袋を用意して頂き、必ず着用して下さい。


使用工具：④ ドライバー

部品名\機種品番	NVS-1A	NVS-2A	NVL-1A	NVL-2A
木天板	1	1	1	1
脚	2	2	2	2
継ぎ板(上)	2	2	2	2
継ぎ板(下)	2	2	2	2
脚キャップ	8	8	8	8
④トラス小ねじ(M4×12)	16	16	16	16
④トラス小ねじ(M6×12)	4	4	4	4
注射台用引出	-	1	-	2
④トラス小ねじ(M6×15)	-	4	-	8


組立手順

注意：NVS-1A・NVL-1Aは組立手順3)～6)で組立てて下さい。
：NVS-2A・NVL-2Aは組立手順1)～7)で組立てて下さい。


1) 注射台用引出の引出しを手前に引出し、正面を持ち上げるようにして引出しを外します。

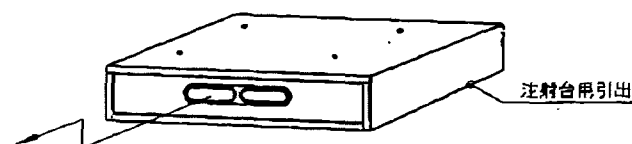


2) 注射台用引出の天板に付いているキャップを取り外し、木天板の裏面に④トラス小ねじ(M6×15)で取付けます。

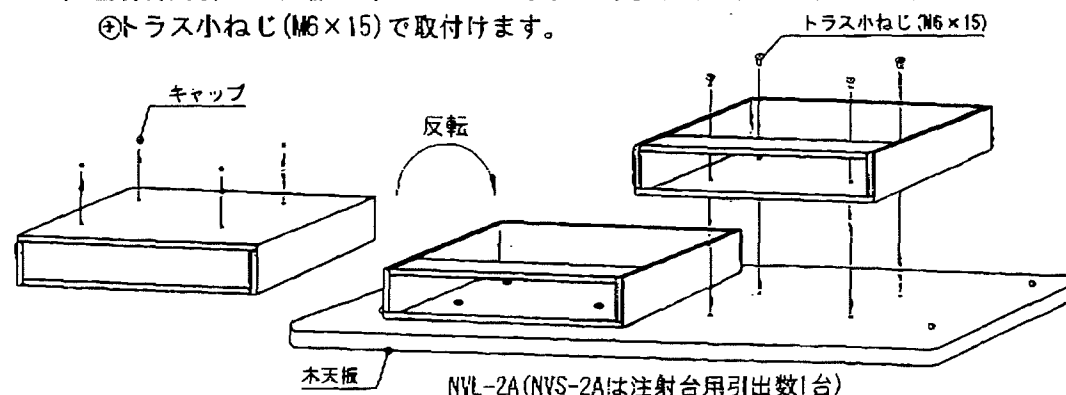


3) 木天板の裏面のねじ穴に合うように脚を乗せ④トラス小ねじ(M6×12)で4ヶ所仮止めして下さい。
※脚の取付に注意：グリップボルトが外向きになるように取り付けて下さい

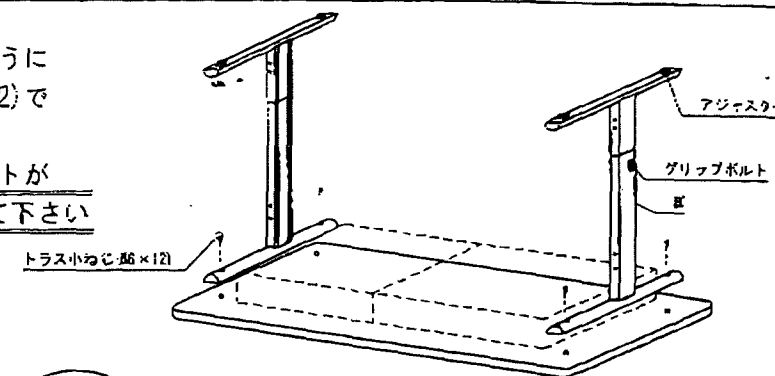

4) 継ぎ板(上)(下)を④トラス小ねじ(M4×12)16ヶ所固定し、3)で仮止めたねじを増し締めして下さい。

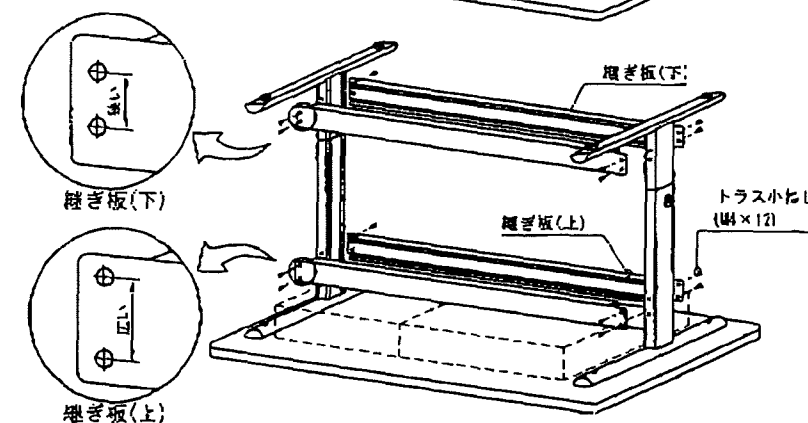

5) 脚キャップを8ヶ所嵌めて下さい。

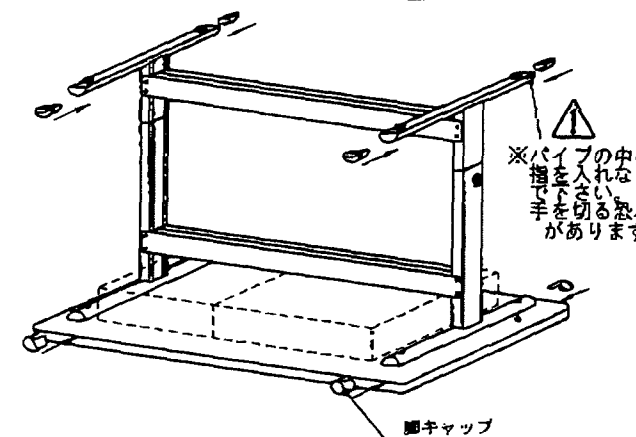

6) 組立てた注射台を起こして下さい。

7) 1)で外した引出を取り付けます。

天板の高さ調整

・グリップボルトを外し、脚をスライドさせ40mmピッチで、H750mm～H950mm6段階に調整出来ます。

《出荷時はH750mmになる様セットしています》

