

スリムオムツ交換車TL-01(スリムタイプ) 品番:8-9979-01

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知らるために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡してください。



<取扱注意事項>

- ご使用の時にはキャスターを完全にロックして作業して下さい。
- エレベーター等の乗降の際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 平坦な床でご使用ください。
- 分解・改造はしないでください。

<特長>

- キャスターは四箇所ストッパー付き
- 25Lのゴミ箱を搭載しています。
- 上段バスケット、下段トレーの収納ケースは入れ替え可能です。

<仕様>

- 材質：本体／スチール（粉体塗装）
天板／メラミン化粧合板
ケース・ゴミ箱／PP（ポリプロピレン）
キャスター／ウレタン
- キャスター：φ75mm（四ヶ所ストッパー付き）
- サイズ
全 体：幅790×奥行455×高さ938mm
上ケース：幅420×奥行315×高さ135mm
下ケース：幅420×奥行315×高さ145mm
ゴミ箱：幅373×奥行278×高さ476mm

<使用方法>

[キャスターをロックする]

- ①キャスターは4個ともストッパーが付いています。
- ②キャスター先端のレバーを下げて固定して下さい。
- ③キャスターは4個とも個別にロックを掛けて下さい。



ロックが掛かります。



ロックが解除します。

[キャスターのロック解除]

- ①キャスター先端のレバーを上げるとロックが解除します。

<収納ケース使用方法>

[上段ケース]

- ①上段のケースは引き出し式に前後にケースを引き出せます。
- ②上段ケースは引き出し式になっていますが操作はゆっくりしていねいをお願いします。
- ③上段ケースを取り出す時はフレーム枠から持ち上げて取り出します。



前後に可動します。



取り出す時は持ち上げる。

[下段ケース]

- ①下段のケースは固定式です。
- ②下段のケースを取り出す時はケースを持ち上げて取り出して下さい。

*上段、下段のケースは入れ替えてのご使用も可能です。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意



・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

AS ONE アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > 0120-711-875

> FAX 0120-700-763

問合せ専用URL > <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません