

取扱説明書

Instruction Manual

らくらくあるくん用オプション (専用酸素ボンベ架)

Rkun-O2

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


使用上のご注意

- ・ 定期的にビス類/ノブネジにゆるみがないかをご確認のうえ使用してください。
- ・ 酸素ボンベ(500ℓ)以外の物は使用しないでください。
- ・ 歩行器に設けられた取り付け穴を必ず使用してください。
- ・ 本製品は「らくらくあるくん」のみに取り付けることが出来ます。
- ・ 歩行器が著しく斜行するなどする場合は本製品の使用を中止してください。

● 取付方法

- ① 歩行器フレーム前部に架けます。
- ② 上下2か所の取付穴に上からビスを差し込みます。
- ③ ワッシャー・ナットを取り付けて固定します。
- ④ エ具(プラスドライバー・スパナ(サイズ10)等)を使いしっかりと締め付けてください。
- ⑤ 酸素ボンベを挿入し、ガタツキ防止用のノブネジを締めてください。

取付穴2ヶ所

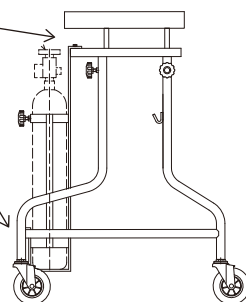

● 仕様

サイズ: φ115mm×H675mm、材質:スチール製、ポリエステル系塗装仕上げ、重量:2.5kg

● 取付可能な対象商品

8-6500-01	らくらくあるくん	Rkun-SOR	標準 オレンジ
8-6500-02	らくらくあるくん	Rkun-SBL	標準ブルー
8-6500-03	らくらくあるくん	Rkun-SGR	標準 グリーン
8-6501-01	らくらくあるくん	Rkun-ROR	抵抗器有 オレンジ
8-6501-02	らくらくあるくん	Rkun-RBL	抵抗器有 ブルー
8-6501-03	らくらくあるくん	Rkun-RGR	抵抗器有 グリーン
8-9294-01	らくらくあるくん～ネイチャー～	Rkun-SHY	標準ヒヨウ
8-9294-02	らくらくあるくん～ネイチャー～	Rkun-SFW	標準 フラワー
8-9294-03	らくらくあるくん～ネイチャー～	Rkun-RHY	抵抗器有 ヒヨウ
8-9294-04	らくらくあるくん～ネイチャー～	Rkun-RFW	抵抗器有 フラワー

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2015年8月初版