

取扱説明書

Instruction Manual

らくらくあるくん ～替えカバー～

お買い上げ誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

目 次

対象歩行器…………… P.1
交換方法…………… P.2

お手入れ方法…………… P.3
仕様…………… P.3

8-6501-21
オレンジ



8-6501-22
ブルー



8-6501-23
グリーン



8-6501-24
ヒョウ



8-6501-25
フラワー



8-6501-26
ウシ



本商品は、らくらくあるくん専用の替えカバーになっております。

対象歩行器：


8-6500-01,02,03	らくらくあるくん	スタンダード(オレンジ・ブルー・グリーン)
8-6501-01,02,03	らくらくあるくん	抵抗器付き(オレンジ・ブルー・グリーン)
8-9294-01,02	らくらくあるくん	スタンダード(ヒョウ・フラワー)
8-9294-03,04	らくらくあるくん	抵抗器付き(ヒョウ・フラワー)

交換方法

- ①歩行器本体のノブネジを緩めて、肘付きマット（支柱）を外します。



- ②肘付きマットについている支柱4本を左回転で回し外します。

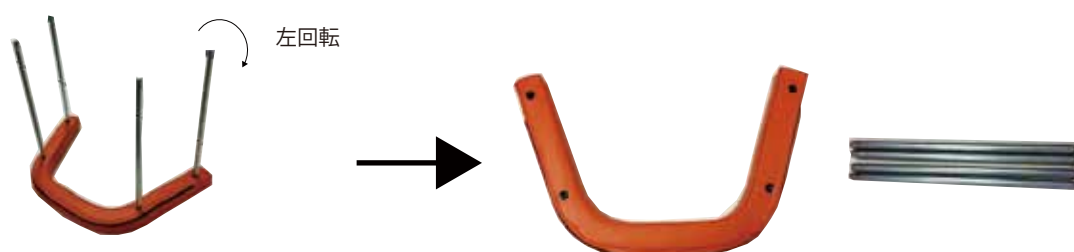

- ③ファスナーを開き、古いカバーを外します。

- ④替えカバーを装着します。

替えカバーの穴が、支柱の穴（4か所）に合うようにします。

- ⑤両端から左右均等に伸ばしながら装着します。



- ⑥ファスナーを締めて下さい。

- ⑦ ②の逆の要領で、支柱4本を取り付けます。ゆるみやガタツキがないようにきつく締めます。

- ⑧歩行器本体に差込み、高さを調整し4か所のノブネジできつく締めます。



お手入れ方法

表地は、濡れた布等で清拭してください。
耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムとなっております。

仕 様

材質:合皮レザー

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分