




8-6986-01～03/8-6987-01～03 レギュラー 2段・3段  
8-6988-01～03/8-6989-01～03 ラージ //

この度は本製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。

ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用頂けますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

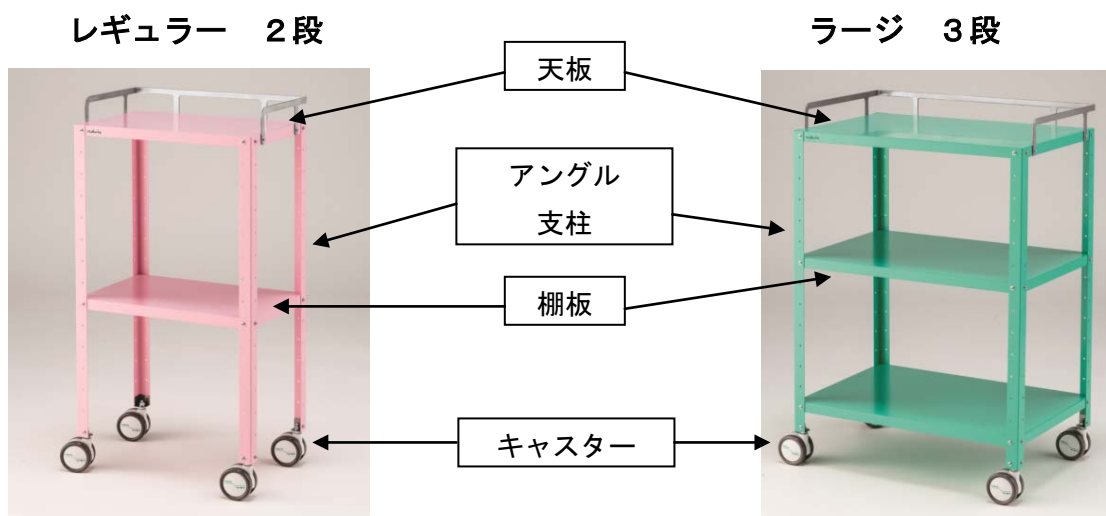

⚠ 注意

- ・ 本商品は器具等を運搬するためのワゴンです。人や動物などを乗せないでください。
- ・ 本取扱説明書明記の最大耐荷重（棚板あたり）を超える重量物を載せないでください。
- ・ 本説明書の組立方法にある通りにしっかりと＋ドライバーで組み立ててください。
- ・ 組立する際には、各部品の角の部分などでけがをしないようにご注意ください。
- ・ 本商品のキャスターにはストッパーが付いておりません。定置するには予期しない移動を防止するための固定をして下さい。
- ・ 安全性に配慮し、平坦な場所でご使用ください。
- ・ 本製品はステンレスでできておりますので、金属の特性上、塩素や酸の強い環境では腐食が起こることがあります。特に濃い塩素や酸系の薬品が金属表面に付着した場合には、出来るだけ早く拭き取ってください。
- ・ タワシや磨き粉・研磨剤入りのスポンジ等での表面清浄は、塗装面・ステンレス表面を傷つけることがあります。
- ・ 誤った使用方法や無理な加重は、変形・損傷の原因になりますのでお止めください。
- ・ 使用しているうちにねじが緩んでくることがありますので、定期的にねじの増し締めをしてください。
- ・ 使用中に変形やねじのゆるみによりガタツキが生じた場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用されますと事故の原因となります。特にキャスター部については段差の衝撃等によりねじのゆるみが発生しますので定期的にご確認ください。
- ・ 定期的にキャスターに挟まったゴミや髪の毛を取り除いてください。故障の原因となります。
- ・ 本品への改造行為は危険ですので絶対に行わないで下さい。製品保証の対象外となります。

## 部品と数量

	【天板】	【棚板】	【アングル支柱 (キャスター付)】	【ワッシャー付ネジ (+)】
レギュラー 2段	1枚	1枚	4本	16個 + 予備1個
〃 3段	1枚	2枚	〃	24個 + 予備2個
ラージ 2段	1枚	1枚	〃	16個 + 予備1個
〃 3段	1枚	2枚	〃	24個 + 予備2個

※+ドライバー付属 (1本)

## 組立方法

1. 付属のワッシャー付ネジ (+) で天板・棚板とアングル支柱を固定します。アングル支柱は、キャスターの付いている方向を下側にしてください。
2. キャスターは4カ所共に同形状です。一番上の天板よりアングル支柱をネジ止めしてください。
3. 中段 (3段タイプのみ)・下段とアングル支柱に位置を決めて、同じ高さでネジ止めしてください。
4. ネジ止め箇所は、3段タイプは24カ所、2段タイプは16カ所、しっかり緩みの無いように締めてください。
5. 全ネジ止め箇所がしっかりとしまっているか、棚板の高さが平行か、确实にご確認の上ご使用してください。

## 特長

- ステンレス製のカラフルな組立式回診車です。使用エリアなどで区分けしてご使用頂けます。
- 落下防止の為の手すりが三方についています。
- 天板高さは約51.8mm間隔で設定可能です。

## 仕様

商品コード	8-6986-01~03/8-6987-01~03	レギュラー	2段・3段
	8-6988-01~03/8-6989-01~03	ラージ	2段・3段
	(01:ピンク / 02:グリーン / 03:ラベンダー)		
型番	CSWR-2P/CSWR-2G/CSWR-2L / CSWR-3P/CSWR-3G/CSWR-3L CSWL-2P/CSWL-2G/CSWL-2L / CSWL-3P/CSWL-3G/CSWL-3L		
寸法	レギュラー / W453 × D301.5 × H897mm (ネジ頭省く) ラージ / W603 × D401.5 × H897mm (ネジ頭省く) (キャスター: φ75mm、ストッパー無し)		
有効棚板寸法	レギュラー / W447 × D297mm ラージ / W597 × D397mm		
重量	レギュラー 2段 / 5.5kg 、 3段 / 6.5kg ラージ 2段 / 7.2kg 、 3段 / 8.8kg		
棚板あたり耐荷重	20kg / 段		
材質	天板・棚板・支柱 / ステンレス SUS430		

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
機番	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL :
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL :

**アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## アズワン株式会社

#### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。