


## 《取扱説明書》

品 名	包帯交換車
-----	-------

型番 寸法	BC-1000S 0-3440-11	600*450*875H
	BC-2000 0-3439-01	700*450*850H
	BC-3000 0-4596-01	750*450*880H
	BC-ASS 0-1586-11	600*450*855H

<p>安全上のご注意</p> <p>！警告！</p> <p>怪我等の原因となります</p> 	<p>床面が平滑なところでご使用ください。凸凹状態のところでの押し歩きは本体やキャスター等の部品の破損の原因となります。</p> <p>誤った使用や、無理な荷重等は破損の原因となります。</p> <p>天板等金属板の端部に直接触れないで下さい。手などの怪我等の原因となります。</p> <p>移動の際にはキャスターのストッパーの解除を確認してから移動してください。ストッパーをかけたままご使用になりますとキャスターが破損、脱落する恐れがあります。</p> <p>本体のゆがみやキャスター等の部品に異常がないか定期的にご確認ください。</p> <p>上記の注意点を守り異常やガタツキがないかご確認のうえ正しくご使用ください。</p> <p>もし使用中に変形や曲がり、ネジの緩みなどによるガタツキや異音が発生した場合には直ちに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。そのままご使用になりますとキャスターの脱落や本体の破損により、怪我等の原因となります。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用用途	<p>院内の包帯交換車として診察用器具、器材等をのせて運搬に使用します。</p> <p>BC-1000/3000はスライド式テーブルが付いていますので必要に応じて作業スペースを広げることが出来ます。</p>
材 質	<p>ステンレスNSS442M3（JIS規格 SUS430J1L ） / S U S304</p> <p>442M3はニッケルを含まずにSUS304と同等の耐食性を有する材質で一般には洗濯機のドラムや自動車の排ガス処理部品などで実績のある材質です。</p> <p>また304と異なり磁石が付くのでマグネットクリップなどを利用したメモなどの添付に便利です。</p>
キャスター	<p>BC-1000S/ASS     φ100mm対角ストッパー付</p> <p>BC-2000/3000     φ125mm対角ストッパー付</p>
棚耐荷重	10 k g    一段あたり



# アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは  
カスタマー相談センター

---

フリーダイヤル    > TEL 0120-711-875

                             > FAX 0120-700-763

問合せ専用URL    > <https://help.as-1.co.jp/q>

---

受付時間：午前9:00～12:00、午後13:00～17:30

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません