



取扱説明書

視力検査器用架台 SE-3用 (0-3506-01)

特徴



高さ調節機能が付いた組立式のSE-3専用架台です。

組立方法(安全のために必ず二人以上で作業して下さい。)

- ① 平坦な床に毛布・マット等を敷き、本体フレーム(1番大きなフレーム)を寝かして下さい。
- ② 本体フレームにキャスター付ベース(2個)をスパナ等でネジ止めします。
- ③ しっかりとネジが締まっている事、キャスターのストッパーが掛かっている事を確認した後、ゆっくりと本体を立てて下さい。
- ④ フレーム上側に2箇所あるフック部のノブネジを緩めて、視力検査器をフックに掛けて下さい。
- ⑤ 視力検査器が中央に来るように位置を調節し、フック部のノブネジを締めて下さい。
- ⑥ 本体フレーム左右にあるノブネジを緩め、水平になるよう気を付けながら任意の高さ位置に調節し、ノブネジをしっかりと締めて下さい。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② この製品は視力検査器SE-3専用の架台です。それ以外の物は取り付けることが出来ません。
- ③ 不意に動く転倒する恐れがありますので、移動する時以外は必ずキャスターのストッパーを掛けて下さい。
- ④ キャスターは定期的に掃除して下さい。車軸や旋回部に異物が付着していると、キャスターの動きが悪くなり、移動時に転倒する恐れがあります。
- ⑤ 定期的にノブネジ・ネジの緩みが無いかご確認のうえ使用願います。

 アズワン株式会社	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル >	 0120-711-875 > FAX 0120-700-763 問合せ専用URL > http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	