



床ずれ防止マット
(エア噴出型)

エアーマット

商品コード：0-3678-01

取扱説明書


商品についてのお問い合わせ先

お買上げ年月日	平成	年	月	日
購入先店名				
住 所				
電 話				

⚠ 注意 床ずれ・病臭防止マットを、安全にご使用いただくために！
(ご使用前に必ずお読みください)

- ① マットの上で喫煙しないで下さい。
- ② 本製品は、交流 100V以外で使用しないで下さい。
- ③ 調節器は分解したり、濡らしたりしないで下さい。
- ④ 刃物や尖った物を、マットの上に置かないで下さい。
- ⑤ 調節器を高い所から落としたり、衝撃を与えないで下さい。
- ⑥ 他機種や他製品のマット 調節器との組合せは絶対にしないで下さい。
故障の原因になります。

ナビス エアーマット 各部の名称

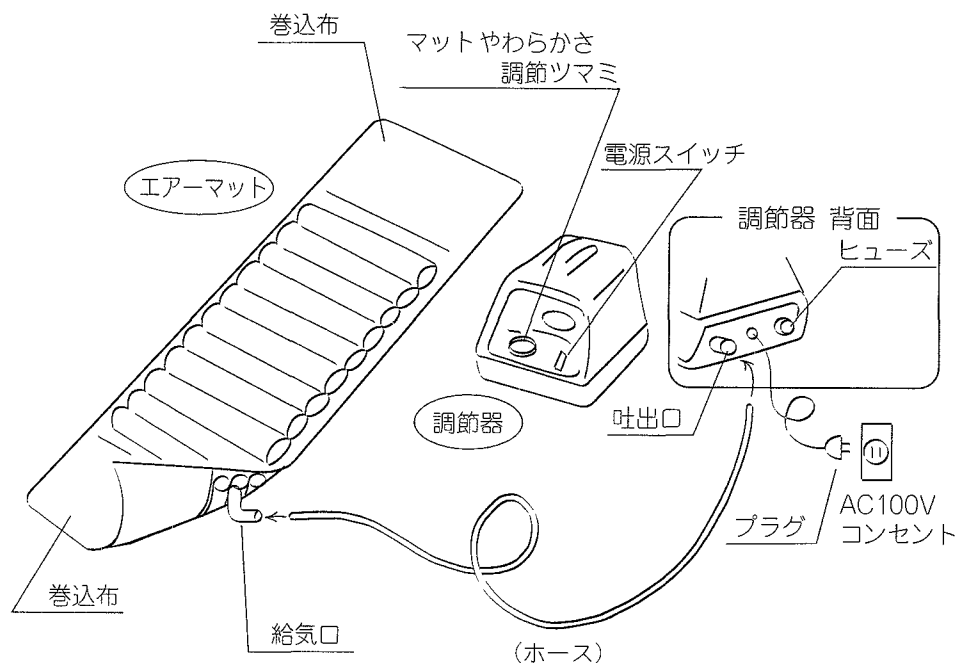

■ご使用方法

- ① マットをベッドのマットレス(又はタタミ)の上に直接敷きます。マットの(上面)が表面ですから、必ず(上面)を上向きに置いて下さい。(表裏を間違えると効果がありません)
- ② 巻込布をマットレスの下に巻き込んで下さい。
- ③ マットの上に、敷布か毛布を敷くのは宜しいですが、通気の悪いビニール(ゴム)シートや敷布団は絶対に敷かないで下さい。(噴出空気の流通が妨げられて効力が激減します)
- ④ マットの給気口を足元側にして、患者さんを寝かせて下さい。
- ⑤ マットと調節器を付属のホースで連結し、プラグを電源に差し込み、スイッチを「入」にすると約10分でマットがふくらみます。
- ⑥ マットは軟らかめに使用するのが効果的です。

効力の実証試験

使用する前に、腰部の下に手を差し入れて、湿りの程度を確認しておきます。使用1週間後に手を入れ、皮膚が乾燥状態になっていれば、この装置が効力を発揮している証拠です。

●最適なやわらかさは

仰向け状態でおしり、
かかとなどが底着きしない程度の軟らかさが最適です。

下図のようにエアーマットのおしりの部分とマットレス(または敷布団)との間が1~2cmになっている事を手のひらを差し込み確認して下さい。



■ご注意

- ① なるべくオムツカバーで密閉せずに、バスタオルで腰の回りを囲んで下さい。(排尿を吸収します)
- ② マットからの微風は患者さんに快く感じられますが、冬季とくに寒く感じる場合は、マットの直接下に電気毛布をしくと暖かくなります。(足元にアンカを置くのも結構です)
- ③ マットは速乾性ですから、汚れを石鹸水でブラシ洗いができます。(マットを強くふくらませた状態で、洗ってすすぎ、陰干しにします)
- ④ 介護する人が、マットの上にいる場合、電源を切って、しばらくしてからのもって下さい。

■仕様

	寸法(mm)	重量	電源
マット	1900×810×85	2.5 kg	—
調節器	310×170×175	3.1 kg	AC100V、50/60Hz、8.5W
ヒューズ	φ6.4×30	—	125V、0.5A

※マットは充気時の寸法です。