

凍らないからやわらかい

〈保冷続〉ソフトクールン

navis\*

## 特 長

- ◎凍らないからやわらかい。  
高吸水ポリマーにエタノールを吸着させたことで、わん曲した部位にも、使いやすくなりました。
- ◎大判サイズでフラットだから使いやすい  
保冷時間は約6～8時間。大判サイズだから、広い患部をしっかりカバー。薄くフラットなので、積み重ねてもかさばりません。冷蔵庫の場所を有効に使えます。
- ◎やさしい感触のカバーを採用  
中身をフィルムでバックし、さらにもう一度バックした安心の二重構造。外側のブルーの外装材は、裏面にエンボス加工（細かい凹凸加工）をほどこしていますので、さらっとした感触です。
- ◎地球にやさしいエコロジー＆エコノミー  
何度でも繰り返しご使用いただけるので、とても経済的。塩化ビニールを使用していないので、燃えるゴミとして処分できるエコロジー対応品です。

## 使用上の注意

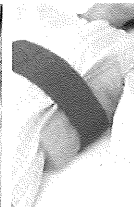
- 本品は直接肌に当てず、必ずタオル等を巻いて適当な温度に調節してご使用下さい。
- おとす、ぶつける、はげしくもむ、とがったもので刺すなどしないでください。破損することがあります。
- 破損した場合は、使用しないで下さい。
- 温めて使用しないで下さい。  
（電子レンジ、お湯などに入れて下さい。）
- 火に近づけないでください。
- 本品は食べられません。
- ご使用にならないときは、冷蔵庫で保管して下さい。
- 直射日光には、あてないでください。
- 可燃ゴミとして捨てられます。
- 中身が目に入ったり、皮膚についたときは、水でじゅうぶんに洗い流した後、医師にご相談ください。
- 疾病で使用の際は、医師にご相談ください。
- 知覚機能低下や意思表示が難しい方を使用する場合は事故防止のため常時観察の上でご使用下さい。

## 使用方法

- 冷凍庫に置き、3時間以上冷やしてからご使用ください。
- 直接肌にあてずに、タオルを巻いて適度な温度にご使用ください。
- 保冷効果がなくなった時は、再度冷やしてご使用ください。くりかえし使用できます。

## 使用例

- ◆保冷枕として使用する際  
適度な柔らかさで頭部にフィットします。

◆関節にクールと  
フィット◆広い患部をしっかり  
カバー◆脳のアイシングも  
スムーズに  
（ヤベールは別売りです。）

サイズ：190×340×25mm  
内容量：1,100g  
保冷時間：6～8時間  
材質：外装/POフィルム、中身/高吸水  
ポリマー・エタノール吸着

商品に関するお問い合わせは

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <http://help.as-i.co.jp/q/>

月曜～金曜 午前9時～12時、午後1時～5時30分まで  
※土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

