

# 取扱説明書

Instruction Manual


## ワンタッチ折りたたみ歩行器

**navis**

0-4448-01 HA6006

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外観図

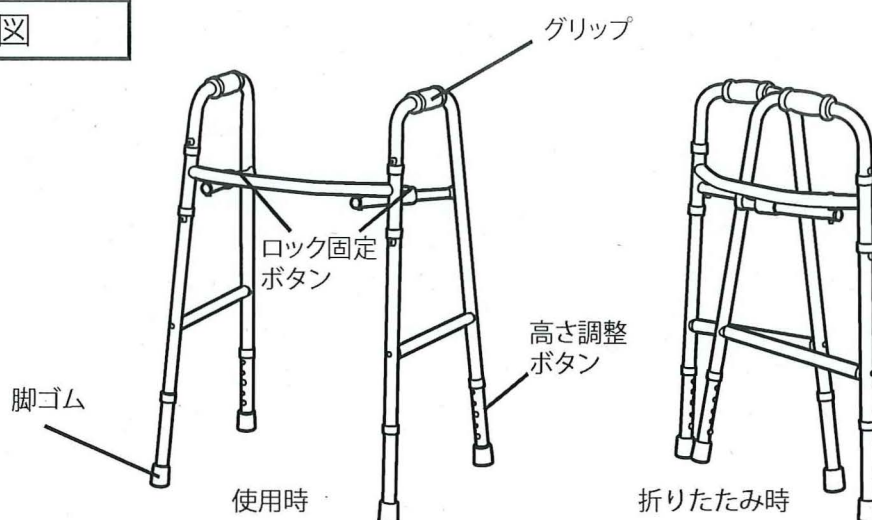

### ⚠ 注意

- 誤った使用方法や無理な荷重は変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 高さを調整する際には、必ず4本の脚とも同じ高さにしてください。事故の原因にもなります。
- 当製品を使用・移動する時は、段差などに十分注意し、静かに移動させてください。  
段差などに引っかかると、転倒し事故につながる場合があります。
- ご使用前（少なくとも一ヶ月に一度）は、各部に傷みがないか点検してしてください。
- ご使用中に変形や各ボタン・パイプのゆるみにより、ガタツキが生じた場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用されますとケガの原因になります。



### 特長

- ワンタッチで固定解除でき、簡単に折りたためます。
- 前面バーの高さが630～730mmありますので、トイレでも邪魔にならない高さです。

### 組立方法


#### <ロックの解除／固定>

- 1** ロック固定ボタンを押すと、左右の脚の開閉が出来ます。
- 2** 足を完全に広げ、必ずロックボタンがカチッと音がした事を確認してからご使用ください。
- 3** たたむ時はロックボタンを押して行います。

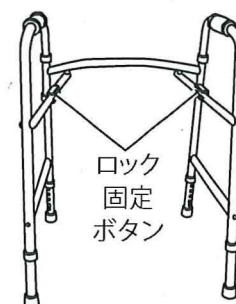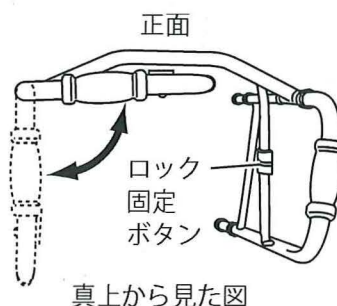

<脚の高さ調節>

- 1** 高さ調整ボタンを押し込み4本とも希望する同じ高さに合わせてください。
- 2** 高さ調整ボタンがカチッと4本とも音がしたことを確認してからご使用ください。

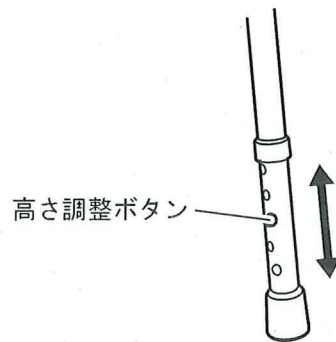

仕様

寸法（使用時）	W610×D465/490×H790～890mm ※奥行は高さ最上段時／490mm、最下段時465mmとなります。
折りたたみ時	W560×D110×H790mm（※自立はできません。）
前面バー高さ	H630～730mm
高さ調節	4段階（25mm毎）
材質	φ28.6mmパイプ／スチール      グリップ／ウレタンフォーム 脚ゴム／ゴム（部品品番／0-1405-13 交換用脚ゴムHA9010グレー）
重量	約2.5kg

Made in TAIWAN

販売元:アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ワンタッチ折りたたみ歩行器
型 式	HA6006
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年      月      日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住      所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-711-875      (フリーダイヤル)

 0120-700-763      (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>



**アズワン株式会社**