

取扱説明書

0-4488-11 点滴処置台（キャスター付）

NRK-1500

1. 特徴

天板がデコラ貼りですので、点滴補充作業中などの時に金属音が少なくソフトな手触りです。引出しはトレータイプになっていますのでトレー毎の交換ができ便利です。点滴掛け棒は高さ調節することが出来ます。

2. 取扱い上の注意

- ①平坦な床でご使用下さい。
- ②ステンレス板及びパイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ③処置台として使用する際は、キャスターストッパーをおかけください。
- ④天板への耐荷重は70kg/fですのでそれ以上は載せないでください。
- ⑤上段及びリング架だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますとバランスを崩し転倒する恐れがありますので注意して下さい。
- ⑥引出しは樹脂製なので落としたり、本体を転倒させたりすると、割れる恐れがあります。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル:0120-711-875

FAX:0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません