



取扱説明書

与薬車 40人用 (0-473-01)



与薬車 60人用 (0-473-02)

特徴

- ボックスは手前に70度まで引き出せますので薬の取り出しが容易に出来ます。
- ボックスは両面式で片面に20個(40人用)、または30個(60人用)セットされています。
- 薬袋(中位)がそのまま入ります。
- ボックスの中箱を取り出して掃除出来ます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ ケースを引き出したまま移動しないで下さい。
- ⑤ ケースを強く引っ張りますと抜けることがありますので注意して下さい。
- ⑥ ケースは樹脂製ですので、落としたり強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル		0120-711-875
	F A X	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		