




CN-191. 192 姿勢矯正ミラー 取扱説明書

この度は、ご購入頂き誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読み下さい。

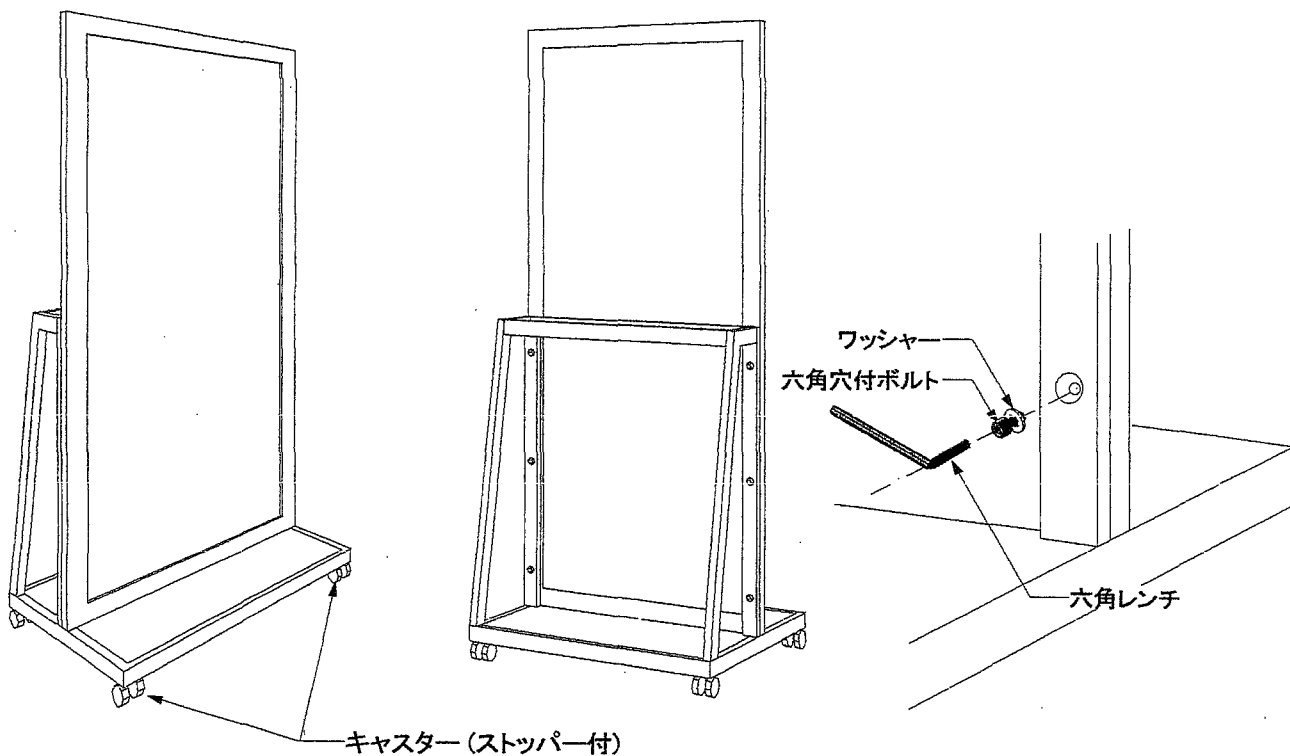

製品スペック

本体 スチール製 焼付塗装 キャスターストッパー付 (4ヶ)
 鏡枠 木製 (ラミン材 ナチュラル仕上げ) 鏡飛散防止加工
 六角穴付ボルト6ヶ、 ワッシャー6ヶ、 六角レンチ1ヶ

組立方法

本体のキャスターをストッパーに入れ固定して下さい。
 本体の上に鏡枠を置き、穴の位置を確認の上、六角レンチにボルトを入れ
 ワッシャーを差し込んで、緩めに6ヶ所止めた後 固く締めて固定して下さい。

操作方法

- ・ ご使用の時必ずストッパーをかけて下さい。
- ・ 移動の時は必ずストッパーを外してスチール部分を押し移動して下さい。
- ・ 鏡枠 及び鏡には触れないで下さい。

安全にお使い頂くため

1. 操作方法を必ず守って下さい。
2. 汚れを落とす場合は、シンナーベンジン等を使わず薄めた中性洗剤で下拭きし乾いた柔らかい布で良く拭いて下さい。
3. 鏡にヒビ又は割れが生じた場合は、直ちにご使用をやめ小さく飛散った破片を、ほうき等で清掃して（素手では触らないで下さい）お買上げ店にご連絡下さい。

警告

鏡にボール等 物を投げないように注意して下さい。
万一ヒビ又は破損が生じた場合は、絶対に素手で触らずほうき等で清掃して下さい。

商品についてのお問い合わせは
小野シャンブル株式会社
大阪市平野区瓜破南 2-4-111
Tel. 06-6708-7346