


この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下。

使用方法

- 沸騰直後の熱湯を入れないで下さい。

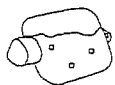


- 湯たんぽを布袋でつつみ、肌から離してご使用下さい。

沸騰させた場合は少しさましたお湯（70℃程度）を2/3程度入れ、横に寝かせて空気を抜き、口栓をしっかり閉め、漏れのないことを確認して下さい。

必ず布袋で包み、低温やけどを防止するために、肌から離してご使用下さい。
特に、乳幼児、老人、病人がご使用になる場合はご注意下さい。

- 長期保管される場合は乾燥させて保管して下さい。

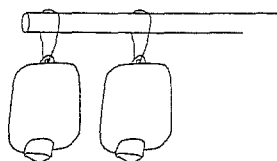

長期保管される場合は、表面の汚れを中性洗剤等で落とし、表裏とも水洗いして内部をつり下げて乾燥させた後、保管して下さい。

ご使用上の注意



■直接火にかけたり、鍋、電子レンジなどで暖めないで下さい。
火災や、爆発などの事故につながります。
絶対にお避け下さい。



■沸騰直後の熱湯を入れないで下さい。
沸騰直後の熱湯は注入時に危険を生じます。
また、湯たんぽの劣化が早くなります。



■表面に油、薬品などを付けないで下さい。
油や油性の薬品が付着しますと、膨潤や目に見えない劣化を起こします。



■直射日光や風の当たる場所等に放置しないで下さい。
ひび割れなどの劣化が早くなります。また、物を上に置いた状態で保管しないで下さい。

お願い

- 本製品はゴム製ですので、ご使用中あるいは、長期保存中に變形、亀裂等が生じたり、粘着性を持つことがあります。
このような場合にはご使用を中止し、お買い換えをお願いいたします。

■商品についてのお問い合わせは・・・

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。