


取扱説明書

シャンプーチェアー MCS-340N

この度は当社製品 シャンプーチェアー
をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
より安全にご使用いただくために、ご使用になる前には必ず
この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
また製品を末永くご使用いただくために、
この説明書は大切に保存してください。

各部名称

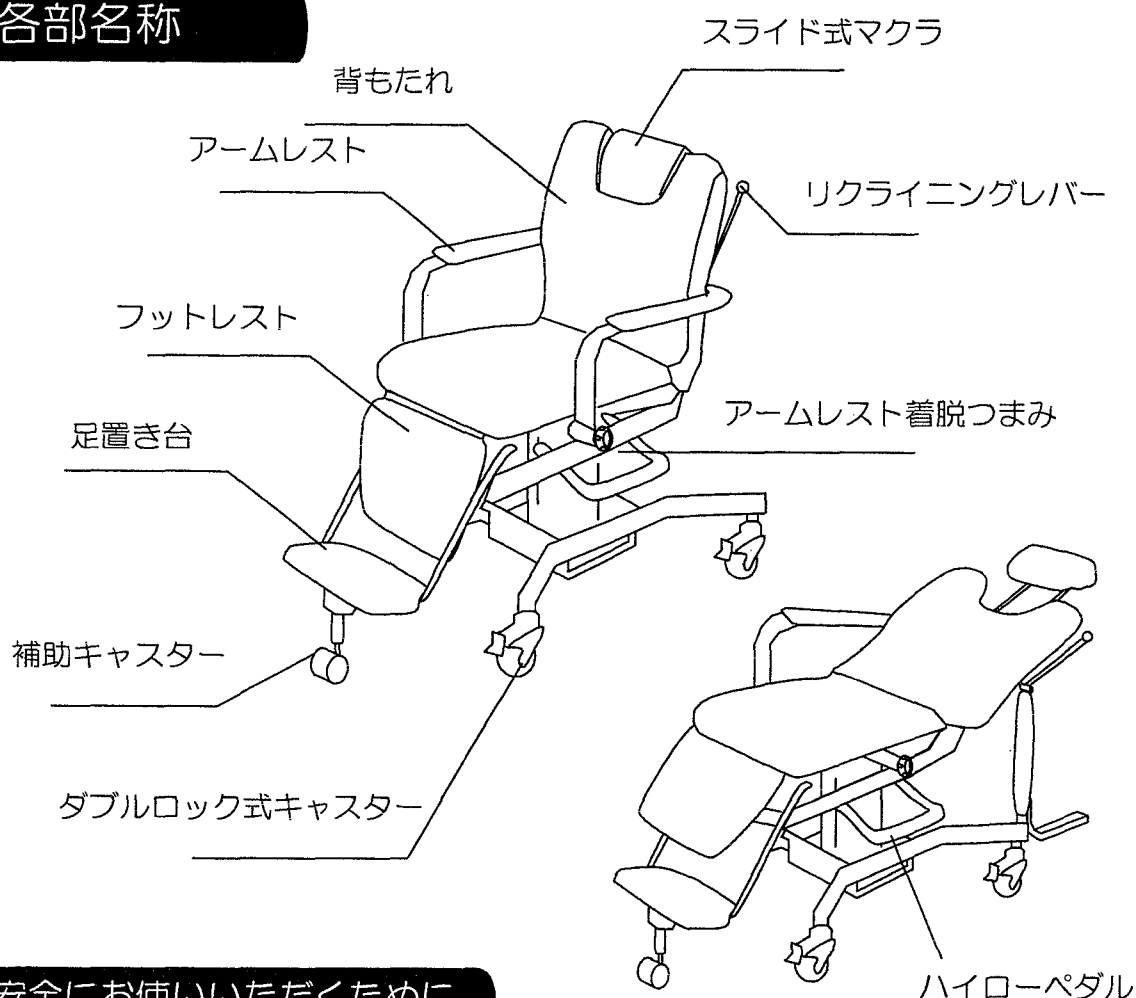

安全にお使いいただくために

 屋内使用	シャンプーチェアーは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けて下さい。
 改造禁止	シャンプーチェアーは基本的使用上、不備が発生しないよう剛性を重視して設計、製作されております。強度を損なうような改造は行わないで下さい。

○使用上の注意、警告事項

- シャンプーチェアーに乗り降りする際には、必ずストッパーでキャスターを固定して、イスを一番下まで下げてください。
- シャンプーチェアーの高さ調節はハイローペダルにより行えます。
(ペダルを浅く連続的に踏むと高くなり、深く踏み込むと低くなります。)
またハイローペダルを持ち上げると、昇降止めのストッパーが効くようになっています。シャンプーチェアーを移動する時には必ずこの昇降止めストッパーを効かせてください。
- シャンプーチェアーを使用する際には、適度な高さに合わせ、昇降止めストッパーを効かせてから、リクライニングレバーを前にシフトさせゆっくりと背もたれを倒してください。
- 背もたれにもたれたままの状態ではリクライニングレバーを操作すると、いきおよく倒れてしまうことがありますのでご注意下さい。
- アームレストを取り外す場合は着脱ツマミをゆるめ、ゆっくりと後方に回転させて下さい。アームレストをもとに戻したら、着脱つまみをしっかり締めて下さい。締め足りないと使用中にアームレストがはずれる可能性がありますのでご注意下さい。
- 着脱つまみを締めたままアームレストを上を持ち上げたり、アームレストを引っ張って本体を移動させたりしないでください。また、アームレストの上に腰掛けたり、重いものを載せたりしないでください。
- 足置き台に付いている補助キャスターはイスを一番下に下げた状態で床面より1～2cm浮いています。(補助キャスターは、乗り降りの際に足置台上に人が立った場合でも本体が倒れないように付いているもので、走行時には邪魔にならないように床面より少々浮いています。)
- 移動時に補助キャスターが段差等に引っかかる場合は、本体を少し上昇させてください。補助キャスターを取り外したり、上下に調節することはできません。

アズワン株式会社

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書No.KK-TT0001-0022
2001年8月改訂