



蒸気滅菌 NB清拭車

NB 812シリーズ (型式) 812, 812S 812W

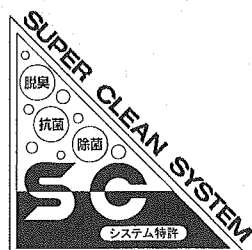

取扱説明書

保証書付

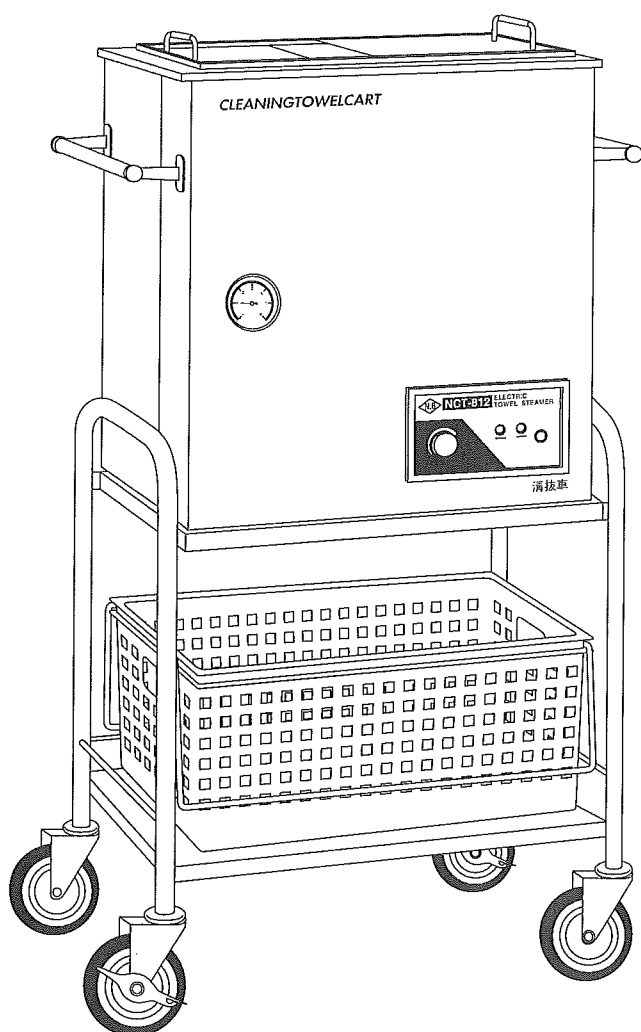

このたびはNB清拭車をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。とくに「安全上のご注意」は必ずお読み下さい。
- この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。大切に保管して下さい。

もくじ

安全上のご注意	1、2
各部の名称とはたらき	3
各形式の各部寸法	4
操作方法	4
使用上のご注意	5
「故障かな？」とおもったら	5
アフターサービスについて	6
仕 様	6
保証書	裏表紙



日 鋳 工 業 株 式 会 社

〒546-0002 大阪市東住吉区杭全4丁目5-12 ☎(06)6713-5027(代)

FAX(06)6719-7230

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容



注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。




警告



- タオル以外のものは入れないでください。内部は高温ですので変形、破裂、汚染の原因になります。

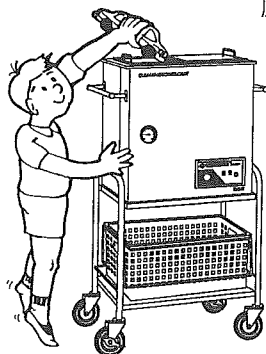

- 不安定な場所に設置しないでください。本体が傾きますと転倒のおそれがあります。必ず水平に設置してください。

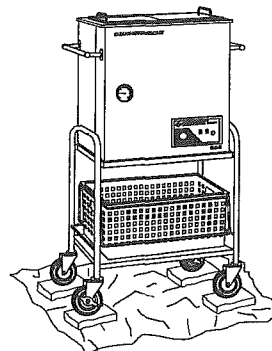

- 人の出入りの多い場所に置かないでください。本体に触れますと火傷の危険があります。




- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。感電・火災・けがの原因になります。◎故障と思われたときは、販売店にご連絡ください。

安全上のご注意




- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電することがあります。

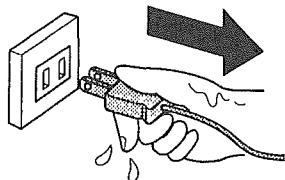

- 直接水をかけての清掃はしないでください。電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因となります。



- 電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因になります。

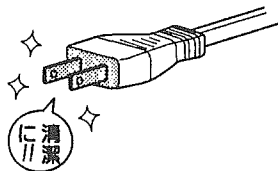

⚠ 注意




- コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。




- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。




- コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

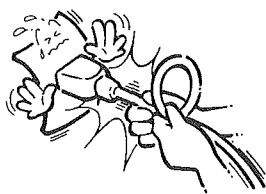

- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。

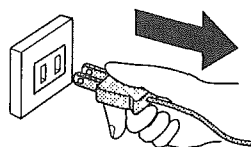


- 電源は100V専用コンセントを使用してください。100V以外では、感電・発火の原因になります。

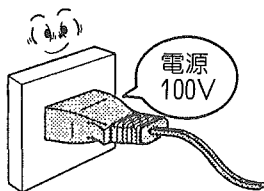

各部の名称とはたらき


■内部構造

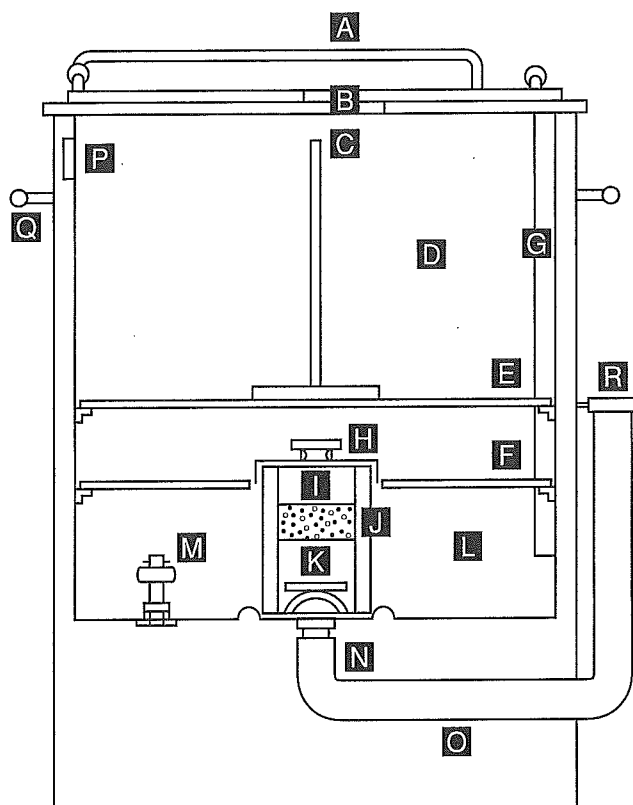

取付部品各部名称

- A** 保温台ガード
- B** 左右スライド扉(取りはずし式)
- C** 仕切板(移動式)
- D** タオル室 タオル収容枚数35~40枚
- E** 中敷網 巻いたタオルは縦に並べてください
- F** 遮蔽板 取外しは、左側に寄せて右を上げて出してください
(設置する時も左側に寄せて入れてください)
- G** 水差し口 上部より水を補給します
- H** 釜蓋 蒸気噴射ノズル付
独自設計で蒸気をむらなく拡散します
- I** 蒸気発生室(高分子セラミック内臓)
- J** 特殊釜(ディスペンサー) 取外し可、
スーパークリーンシステム、
特殊断熱材内臓
(底の丸の円内に設置してください)
- K** 熱源 シーズヒーター100V 800W
- L** 水槽 約8ℓ
- M** 特殊フロートスイッチ 水がなくなると
フロートが下がりヒーター
通電をカットします
- N** 排水エルボ
- O** 排水パイプ シリコンチューブ
- P** 温度コントロールセンサー 内蔵
- Q** 本体取手
- R** 排水パイプ差込み金具
ホースを引き下向きにして、
タンク内の水を排水してください

■スイッチパネル

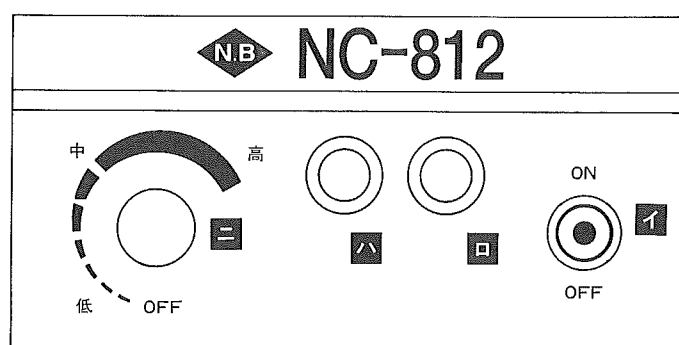


スイッチパネル名称


- I** 電源スイッチ スナップスイッチ。
- 通電ランプ(青) 青ランプが点灯している時はヒーターに通電しています。
- △** 湯水ランプ(赤) 水がない場合にのみ点灯します。(ヒーター通電カット)
- 温度調整サーモ 任意の温度でサーモが働き自動的にヒーターが切れて(青ランプが消える)、温度管理をします。

各形式の各部寸法


■ NB 812

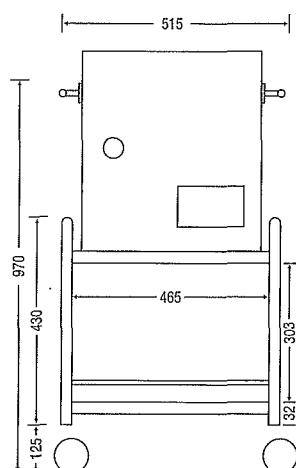


■ NB 812S

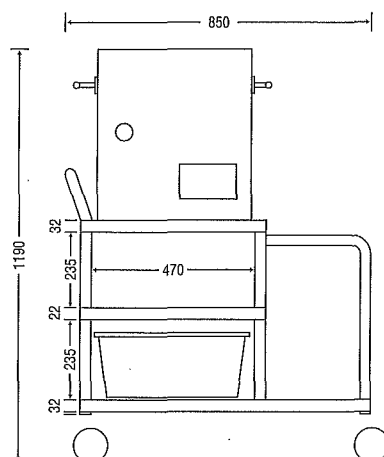

■ NB 812W

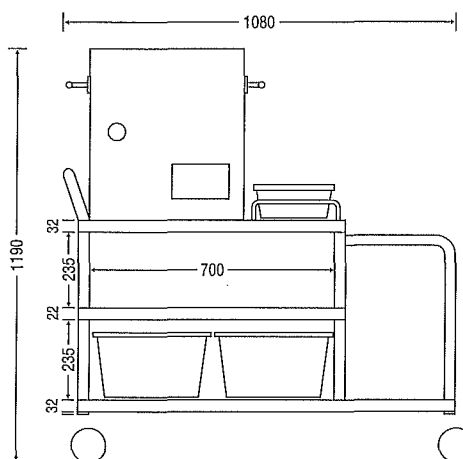

警告シール

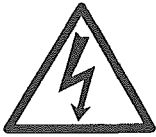⚠ 警告	⚠ 注意
 スイッチ部分に水をかけないでください。内部に浸透して、感電します。	 本体後面のアース線はコンセント差込みのアース取付けに必ず取付けてください。

操作方法

- 水ゲージの適正水量の範囲内まで水を入れてください。水差し口は本体上部右側にあります。
- 電源コードをコンセントに接続。
- 電源スイッチをONにする。(スイッチランプの点灯)
- 温度調整のダイヤルを高にする。(低0~40℃、中40℃~70℃、高70℃~100℃)青ランプ点灯。
- 約30分間位で正面の温度計目盛表示により任意の温度にツマミを合わせてください。
- タオル仕切板は任意の位置で、左右をタオルの使用目的により使い分けてください。
- 就業中に水が最低水量になると、内部のフロートスイッチが下がり、ヒーターの通電がカットします。青ランプが消えて赤ランプ(湯水ランプ)が点灯します。水を補給してください。

使用上のご注意



お手入れの時には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、各ランプの消灯を確認してください。

- 長く使用しますとフロートスイッチにごみ等が附着し、上にあがったままになる事があります。上・下に動かしてみてください。
- 給水或いは排水の際、必ず温度調節ツマミを0にするかメインスイッチをOFFにしてください。（少しの間ですが、ヒーターが空焚きの状態になります）
- 終業時には必ず電源をOFFにして、本体の水を湯栓コックより抜くよう心掛けてください。（水垢の臭いを除去）
- 週に一度は釜底及びヒーターの掃除（ブラシ、又はタワシ）を励行してください。
- コンセントは単体のみでご使用ください。（タコ足配線は絶対避けてください）
- ステンレスはさびにくい金属ですが、下記の条件ではいわゆる「もらいさび」を受けることがあります。
 - ・ 強酸性分が附着（例えばコールド液が蒸しタオルに附着）した場合。
 - ・ 新タオルや、カラータオルの染料及び、のりが附着した場合。
 - ・ 沈積した水の鉄分が附着した場合。

従って錆状の状態が発生した場合、特に釜底及び特殊センサーの先をスポンジ又はステンレスタワシに中性洗剤カフレンザーをつけてこすり落してください。

「故障かな？」と思ったら

修理、サービスをお申しつけになる前に、次のことをお調べください。

状 況	点検してください	処 置
スイッチを入れてもスイッチランプが点灯しない	● 電源プラグが抜けていませんか？ ● ブレーカーが切れていませんか？ ● スwitchのスナッチ部をONにしてもカチッと音がしない（ぐらぐらしている）	● 差し込む ● ブレーカーを入れる ● スwitch交換
青ランプが点灯しない	● 水が入っていますか？（適正水量の位置まで） ● フロートが水を入れてあがっていますか？ ● サーモスタットのダイヤルがOFFになっていませんか？	● 水を入れる ● フロート部を上下に指で移動してください ● 高にする

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

タオルスチーマーのアフターサービスはお買い求めの販売店へお申しつけください。

1. 保証書（取扱説明書の裏表紙が保証書になっております）

- 保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 お買い上げの日から1年間です。

- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い求め先がさせていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理により使用できる製品については、ご要望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用のタオルスチーマーの点検を!



このような
症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- タオルスチーマーにさわるとびりびり電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検、修理をご相談ください。
費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- タオルスチーマーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要なものです。

仕		様		
型 式	NB812	NB812S	NB812W	
電圧・消費電力	AC100V 800W			
全 高	970mm	1,190mm	1,190mm	
間 口	515mm	850mm	1,080mm	
奥 行	358mm	400mm	480mm	
本 体 高 さ	525mm	525mm	525mm	
総 重 量	24kg	33kg	38kg	
タオル収容枚数	35～40枚			
付 属 品	バスケット・大 1個	バスケット・大 1個 袋 1個	バスケット・大 小 各2個 袋 1個	

NB清拭車 保証書

NB 812シリーズ

保 証 期 間	1 年 間	お 買 い 上 げ 日	年 月 日
★ お 客 様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	お名前	様 TEL ()	
★ 販 売 店	住 所	TEL ()	
	店 名		

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

記

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社にご相談ください。

お客様へ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

製造



日 販 工 業 株 式 会 社

〒546-0002 大阪市東住吉区杭全4丁目5-12 ☎(06)6713-5027(代)
FAX(06)6719-7230

修 理 記 録	年 月 日	修 理 内 容	担 当 者