

# ベッドサイド酸素ボンベホルダー HP3070

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書を良くお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 安全上の注意

### ⚠ 注意



禁止

- 本製品は酸素ボンベ専用ホルダーです。それ以外の用途では使用しないでください。転倒・落下などによりケガをする恐れがあります。
- ボンベをラックに載せたまま運搬しないでください。転倒・落下などによりケガをする恐れがあります。



必ず守る

- 使用時は各部のノブやねじをしっかりと締めてください。落下によりケガをする恐れがあります。

### 使用上の注意

- 各部のノブやねじにゆるみがないか、定期的に（週に1回以上）点検をしてください。


ノブやねじがゆるんだ状態で使用されますと、不意の転倒や破損の原因となり、大変危険です。必ず定期的に点検を行い、ノブやねじがゆるんでいる場合は増し締めをしてください。

### 取り付けかた

- Lアングル部をベッド柵に掛け、締め付けノブで固定する。  
※締め付け時は左右均等に締め付けてください。

#### はさんで固定

※フック部は最高幅45mmまで調節可能です。

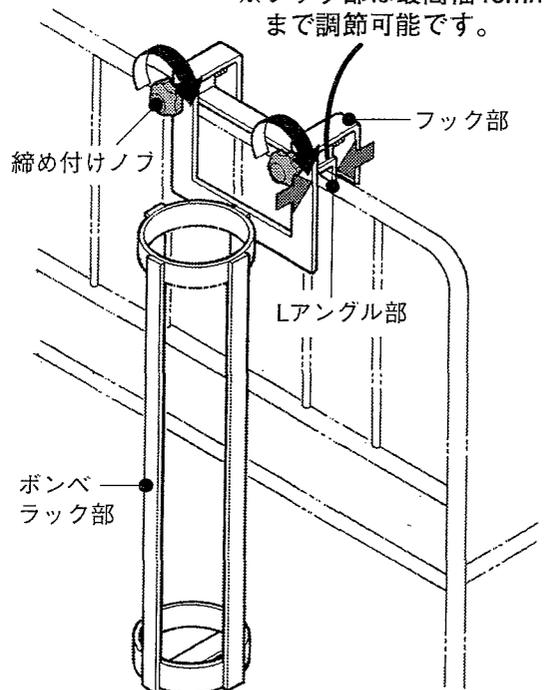

### 製品仕様

全体寸法	220×200×680mm
ボンベラック内寸法	φ107×548mm
材質	スチール(焼付塗装)
取り付け可能パイプ外径	26~45mmの丸・角パイプ
重量	約2.8kg

商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター  
フリーダイヤル ☎ 0120-711-875  
FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時~12時、  
午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません