

取扱説明書

Instruction Manual

クーリングホルダー

ご購入誠にありがとうございます。

首用COOL

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

- ・長時間のご使用は凍傷・低温やけどになる場合がありますのでご注意ください。
- ・知覚機能低下や意思表示が難しい方に使用する場合は、事故防止のため周囲の方が常に観察の上ご使用ください。
- ・高齢者や体の不自由な方、皮膚の弱い方に使用する場合は、冷却時間を短めに設定してください。

●用途：発熱時・暑いとき・首を冷やしたいとき

●各部名称：

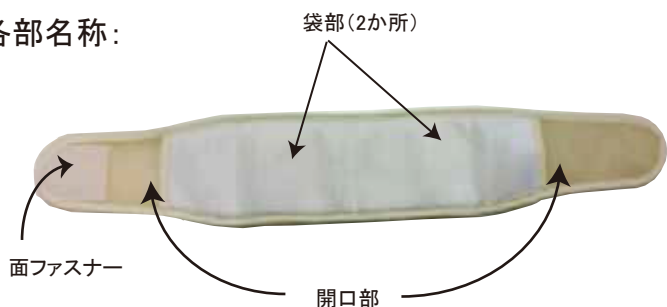

[使用例]

●使用方法：

開口部から袋部に保冷剤(推奨品別売:8-2598-03 プロシエアやわらか保冷枕ミニミニ)を入れて、袋部の白い面を首に当ててご使用ください。

●洗濯方法

両端の面ファスナーを重ね、洗濯ネットに入れて下さい。
洗濯機は40℃以下のぬるま湯、または水で洗濯して下さい。
塩素系の漂白剤の使用はしないで下さい。
脱水機にかけてそのまま陰干しして下さい。

●仕様

材質：フュージョン[®](ナイロン74%、ポリエステル26%)
本体サイズ：全長56cm、最大幅10cm、袋部18×8cm
適応サイズ：45～60cm

●入数：1個 (保冷剤は付属してありません。)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。