

取扱説明書

Instruction Manual

クーリングホルダー

ご購入誠にありがとうございます。

そけい用COOL

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


使用上のご注意

- ・長時間のご使用は凍傷・低温やけどになる場合がありますのでご注意ください。
- ・知覚機能低下や意思表示が難しい方に使用する場合は、事故防止のため周囲の方が常に観察の上ご使用ください。
- ・高齢者や体の不自由な方、皮膚の弱い方に使用する場合は、冷却時間を短めに設定してください。

●用途

発熱時・暑いとき・そけい部を冷やしたいとき

●各部名称:

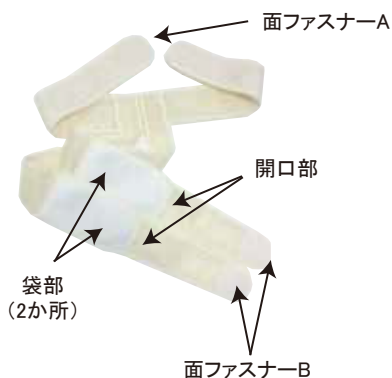

●使用方法:

袋部に保冷剤(推奨品別売:8-2598-03 プロシエアやわか保冷枕ミニミニ)を1つずつ入れて下図のように巻いてご使用ください。



①面ファスナーAでウエストに巻きつける



③左右とめて完了 [前面]



②股の下を通して袋部がそけい部に当たるようにして、前面ウエスト部に面ファスナーBをとめる。



[背面]

●洗濯方法

両端の面ファスナーを重ね、洗濯ネットに入れて下さい。

洗濯機は40℃以下のぬるま湯、または水で洗濯して下さい。

塩素系の漂白剤の使用はしないで下さい。

脱水機にかけてそのまま陰干して下さい。

●仕様

材質:フュージョン[®](ナイロン74%、ポリエステル26%)

本体サイズ:横94cm、縦80cm、袋部18×8cm

適応サイズ:ウエスト部~91cm迄

●入数:1個 (保冷剤は付属していません。)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。