

取扱説明書

エコノミー便尿器保温庫 X0-102

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記







	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示




< 設置上の注意 >

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。


 警告	
	・ 60 以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が転倒、破損する恐れがあります。 ・ 直射日光のあたらないところでご使用下さい。庫内温度が異常に上昇し外装や内装が変形する恐れがあります。 ・ 冷暖房器具の風が直接当たらない所に設置してください。直接風が当たると庫内の温度が安定しなくなることがあります。

< 使用上の注意 >

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・シンナー、ベンジン等、引火性、爆発性のある液体は絶対に使用しないでください。火災や爆発事故の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・温風ユニットに水やその他液体がかからないようにしてください。感電や故障の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグの差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。接触不良により、火災の原因となる場合があります。 ・異常音や異常発熱、発煙がある時は、直ちに電源を遮断して使用を中止してください。電気部品や電気回路の異常が考えられます。 ・温風吹出し口にペン等の異物を入れないでください。故障や感電する恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用中の庫内天板は高温になっていますから手を触れない様にしてください。

⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・庫内天板の温風吹出し口や、背板の排気口は塞がないようにしてください。温度が異常に高くなるなど、庫内の温度が安定しなくなる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・外装/内装部は樹脂製です。乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・移動の際に突起物にぶつける等、強い衝撃を与えると、破損したり故障する恐れがあります。

< 商品外観 >

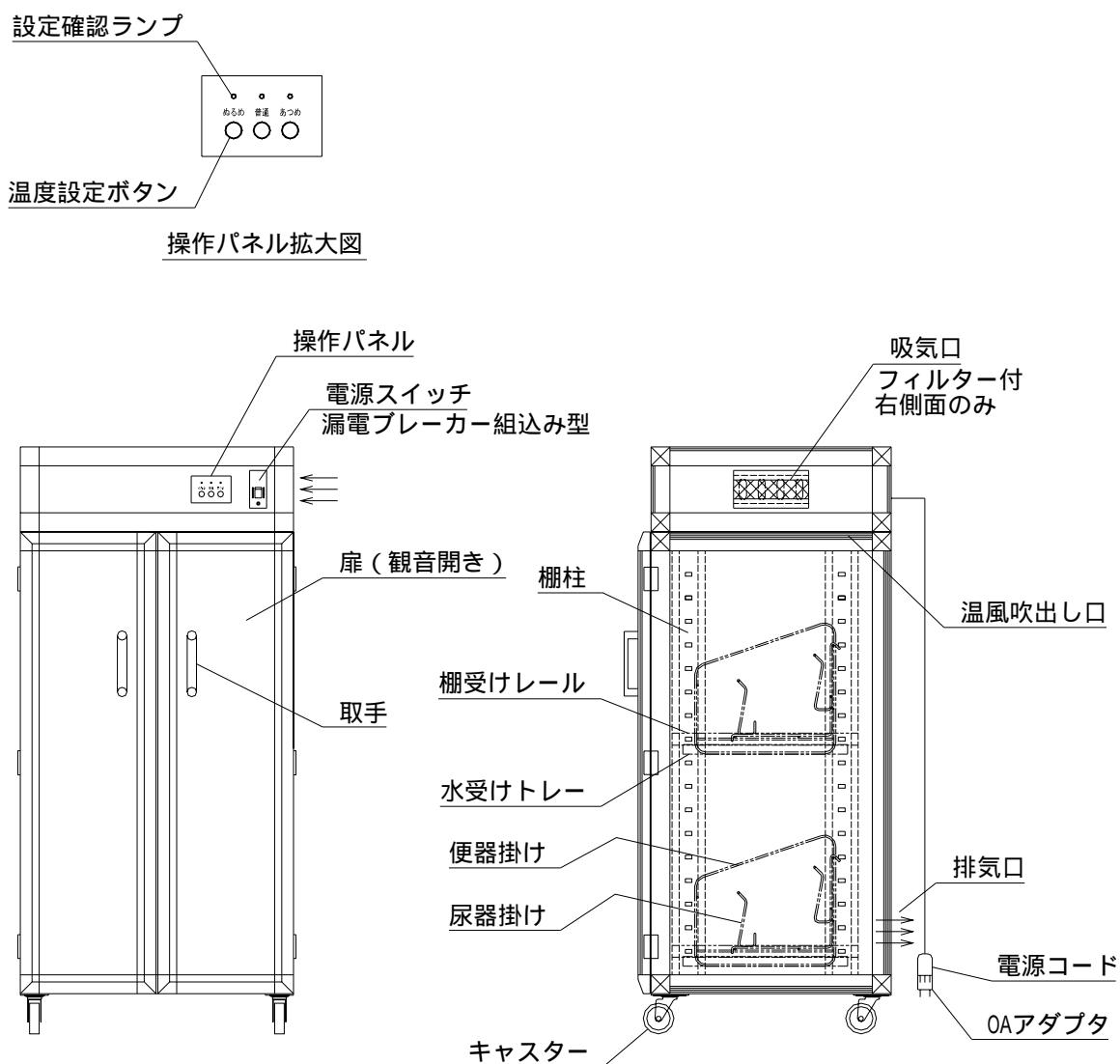

< 使用方法 >

温風ユニットの操作

電源プラグを AC100V のコンセントに差込み、電源スイッチを入れてください。

温度設定ボタンを押し、温度を設定してください。

各設定温度は次のようになります。「ぬるめ：約 37℃、普通：約 40℃、あつめ：約 43℃」（温度精度 ± 約 2℃）

庫内が設定温度になるまで約 1 時間～1 時間 30 分ほどかかります。

使用環境温度により設定温度に到達する時間は変わります。

扉の開閉頻度により庫内温度の安定状況は変わります。

使用環境温度が 20℃ 以下の場合、目的の温度よりも 1～2℃ 程度低くなる場合があります。

運転中でも設定温度を変更することができます。温度設定ボタンを押して温度を変更してください。

ご使用後は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用中の庫内天板は高温になっております。十分に注意してご使用ください。

スイッチを入れても庫内が温まらない（温風が出ない）場合は、温度ヒューズが切れています。何らかの異常が考えられますので販売店に連絡し点検・修理を依頼してください。

本品は送風のための運転はできません。

水受けトレーの取付け

トレー受けレールを本体内部の棚柱に左右が同じ高さになるように取付けてください。


取付ける際は、本体奥側棚柱の角穴にレールのフックを引掛けて手前に引き、角穴前方の切り込み（下側）にレールのフックが引掛かる様にし、次に本体手前側の棚柱の角穴にレールのフックを引掛けてください。奥側棚柱の角穴切り込みにレールのフックが引掛かっていない場合、トレーを引出した際にレール奥側のフックが棚柱から浮き上がり、トレーが落下します。

レールが左右同じ高さになっていることを確認し、水受けトレーをレールに取付けてください。


取付ける際は、トレーの左右にあるガイド部（溝）にレールが入るようにしてください。

ガイド部にレールが入っていない場合、トレーを引出した時にトレーがレールから外れて落下します。

トレーストッパーは、トレーが本体背板に突き当たらない様にするものです。背板に突き当たりますと、風の流が悪くなります。

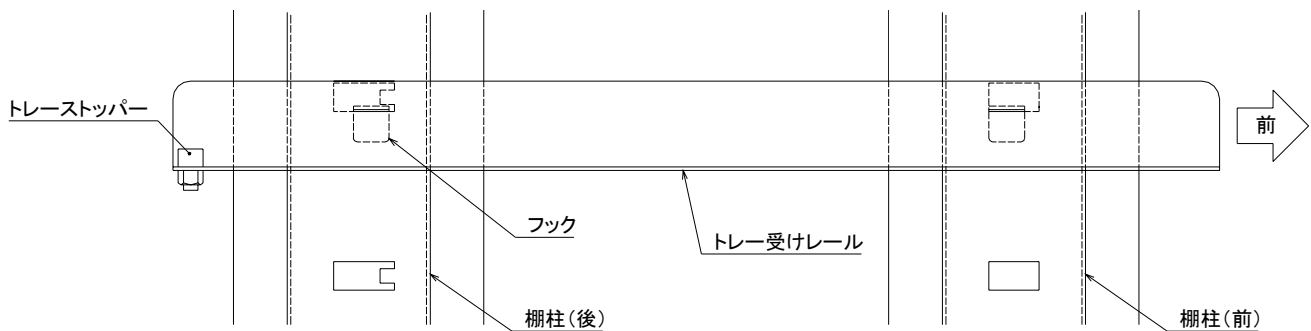

トレー受けレールの取付け

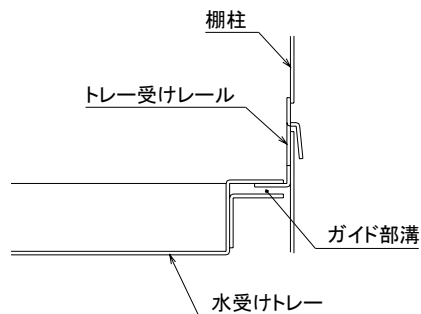


水受けトレーの取付け

便器掛け・尿器掛けの取付け

便器掛けは、水受けトレーに載せてご使用ください。

尿器掛けは、便器掛けに引掛けてご使用ください。

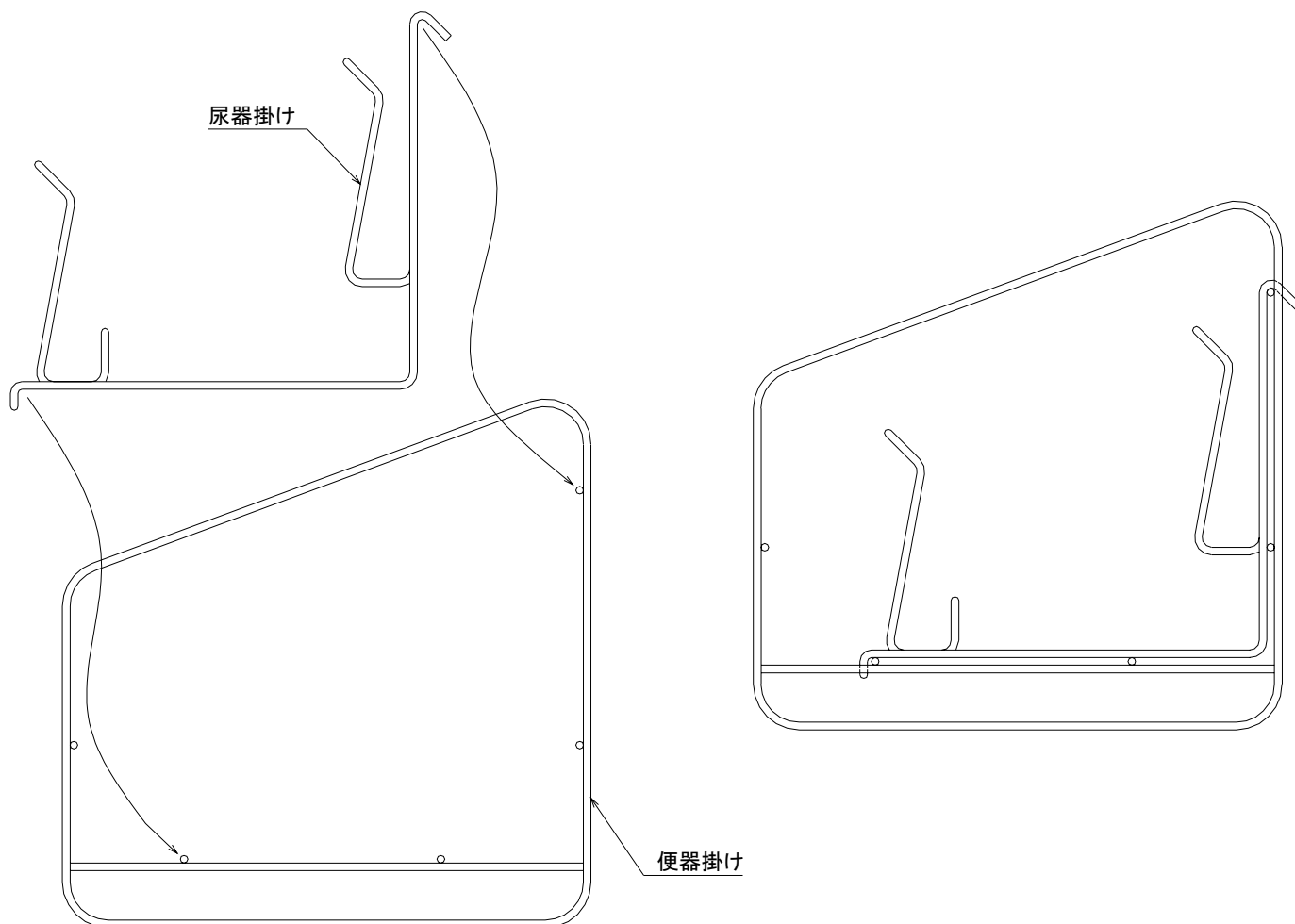

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
⚠	・ 電源プラグを必ずコンセントから抜いて行なって下さい。
⚡	・ 本品に直接水をかけないでください。感電事故や故障の原因となります。
⚠ 注意	
⊘	・ クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

< フィルターの清掃 >

- ・温風ユニット右側面のフィルターを月に1度程度清掃して下さい。
- ・清掃の際は、掃除機などでホコリを吸い取るか、水洗い（手洗い）してください。
- ・掃除機でホコリを吸い取る際は、フィルターが吸込まれない様に注意して下さい。
- ・水洗い後の乾燥は自然乾燥してください。洗剤は中性洗剤をご使用下さい。
- ・汚れがひどくなった場合は交換して下さい。
- ・フィルターを付けずに本品を運転し続けると、ファンやヒーター部にホコリが溜まり、異常発熱して温度ヒューズが切れたり、最悪の場合火災を起す恐れがあります。

< 仕様 >

外寸法	W580×D510/537×H1250
材質	フレーム：アルミ型材、パネル：エンビ（一部鋼板）
	扉板：バレックス
	棚柱／トレイ受けレール／水受けトレイ：SUS304
	便器掛け／尿器掛け：SUS304
	キャスター：車輪／ナイロン 金具／スチール（メッキ仕上げ）
	取手：亜鉛合金 シルバー塗装仕上げ
ヒーター	400W
温度センサ	サーミスタ
安全装置	温度ヒューズ・漏電ブレーカー
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 460W
設定温度	ぬるめ：約 37 ・普通：約 40 ・あつめ：約 43
温度精度	約 ±2
推奨使用環境温度	20 ～ 27
付属品	水受けトレイ × 2 枚、トレイ受けレール × 4 本、便器掛け × 2、尿器掛け × 2

第2版 2007年2月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-776-967

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。