


特徴

- 院内で手軽にオムツ交換や移動ができ、収納に便利な棚やバスケットが付いています。
- スチーム式タオルスチーマーがセットされていますので、オムツ交換の際に蒸しタオルで清拭できます。
- 使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けできます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 付属品のポリダスターは専用品をご使用下さい。専用品以外の物は保持することが出来ません。
- ⑤ ポリダスターは2本の取付用金具の間にしっかりと固定して下さい。取付用金具が緩い場合は両側から押しすぼめて下さい。
- ⑥ 引出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。抜け落ちる恐れがあります。
- ⑦ バスケットを取り扱いする際は落下しないようにご注意下さい。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル		0120-711-875
	FAX	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		