

取扱説明書

とっても静かな枠付き回診車[引き出しなし]

TS6045WB	(0-7976-05)
TS4535WB	(0-7976-06)
TS6045TB	(0-7976-07)
TS4535TB	(0-7976-08)

とっても静かな枠付き回診車[2段]



TS6045W	(0-7976-01)
TS4535W	(0-7976-02)

とっても静かな枠付き回診車[3段]

TS6045T	(0-7976-03)
TS4535T	(0-7976-04)

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 棚板一段につき耐荷重は30kgですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- ⑥ 抜け落ちる恐れがありますので引き出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。

 アズワン株式会社	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル	 0120-711-875 F A X 0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	