

点滴処置台

商品コード : 0-7985-11 NRD-0970-1
 商品コード : 0-7985-12 NRD-1370-1
 商品コード : 0-7985-13 NRD-1396-1

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

⚠ 警告



禁止事項

- 本商品を用途以外には使用しないでください。万一用途以外での使用で事故を起こされても、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故が起きた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
- 商品に座ったり、寄り掛かかったりしないでください。転倒し怪我をすることがあります。

⚠ 注意




禁止事項

- 商品は水平で安定したところに設置してください。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。破損や転倒し、ケガをすることがあります。
- 近くに引火性の固体・液体・気体のないところでご使用ください。
- 近くに火気又は加熱物質を置かないでください。
- 本商品を屋外では使用しないでください。

特長

- ・点滴補充作業中の天板と瓶の接触金属音が少なく快適に作業できます。
- ・作業台の高さは床から850mmです。
- ・点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。
- ・棚板には保管商品を置くことができます。
- ・引出しトレイ毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。(NRD-1396-1を除く)
- ・NRD-1396-1は両面独立したトレイを各2列(合計4列)セットできます。
- ・天板のコーナー部分が丸いため安全に作業できます。


NRD-1370-1

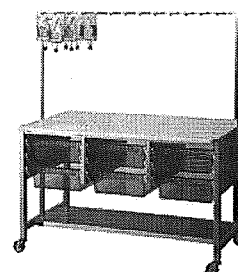

取扱い上の注意

- ・平坦な床でご使用下さい。
- ・エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ・板・パイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ・処置台として使用する際は、キャスターストッパーを掛けて下さい。
- ・天板への耐荷重は70kgですので、それ以上は載せないで下さい。
- ・上段及びリングル架けだけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し、転倒する恐れがありますので、ご注意願います。
- ・引出しは樹脂製ですので、落としたり強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。
- ・リングル架けはリングルを吊るす以外の目的で使用しないで下さい。

外観図

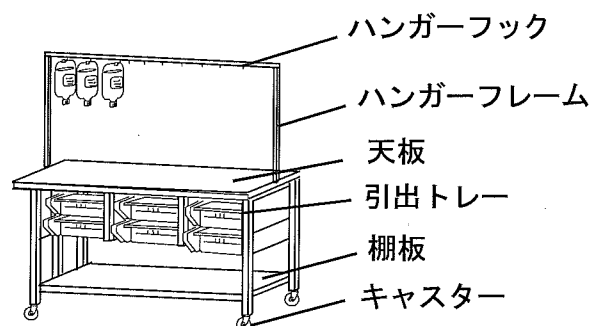

お手入れ方法

- ・本商品に、クレンザー(磨き粉)、有機溶剤(シンナー、トルエン、酢酸等)及び強酸類等の薬品は、絶対に使用しないでください。
- ・汚れを落とす場合には、うすめた中性洗剤を使用し拭き取ってください。

仕様

- ・天板サイズ:NRD-0970-1/935×780mm、NRD-1370-1/1370×780mm、NRD-1396-1/1335×1040mm
- ・天板高さ:850mm
- ・材質:本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
- ・キャスター:φ75mm(対角ストッパー付)
- ・点滴フック高さ:240～800mm(天板からの高さ)

2010年3月 初版

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません