

ナチュラルヒート


(CODE) 0-8092-01・02・13

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

1. 外観



スタンダード
6331

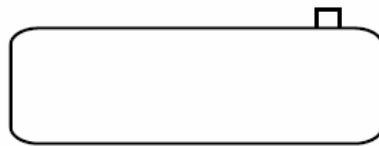

ロング 6341



肩用 6351

2. ⚠ 使用上の注意

安全にご使用いただく為に以下の事項にご注意下さい。

- ・ 熱を伴う病気のと看や炎症部へのご使用はお控え下さい。ご不明な点は、医師または薬剤師にお問い合わせ下さい。
- ・ 長時間、肌にご直接触れる状態にしておくことは避けて下さい。低温やけどの恐れがあります。
- ・ 内容物が漏れ出している場合は使用を中止して下さい。
- ・ ご使用中に肌のかぶれなどの異常が生じた場合は使用を中止して下さい。
- ・ お子様が使用するときには、大人の方の指導監督の下で行って下さい。
- ・ 知覚機能低下や意思表示が難しい方に使用する場合は事故防止のため常時観察の上ご使用ください。
- ・ 加熱前にカバーは必ず外して下さい。
- ・ 定められた加熱時間を厳守して下さい。温め過ぎるとやけどの恐れがあります。
- ・ 加熱時間が長くと、袋が焦げたり、事故を起こすことがあります。
- ・ 使用時には必ずカバーを取り付けて下さい。
- ・ 次に使用する前には、一度冷ましてから加熱してください。

重要:本説明書の注意事項は厳守して下さい。

3. 特長

- ・ 有機栽培で収穫した菜種は熱処理され、衛生的で自然にやさしいエコロジー製品です。(植物由来の材質ですので臭いは品質上問題ありません)
- ・ 温熱療法に使用できます。

4. 使用方法

電子レンジで温めるときは、以下の注意を必ず守って下さい。

1. カバーは必ず外し、500ワットの電子レンジの場合、約60秒本体を温めます。
(500ワット以上の電子レンジをご使用の場合は、時間を短くして温めて下さい。)
2. 温めた本体を軽く振り、温度を確認します。
3. より高い温度をご希望の場合は、10～30秒単位で加熱し、都度温度を確認しながら温めて下さい。
 - ・電子レンジのオート加熱機能は使用しないで下さい。
 - ・あたため過ぎた場合は、ご使用前に適温まで冷まして下さい。
4. ご使用時はカバーを取り付けてください。

5. お手入れについて

- ・カバーは洗濯できますが、本体は洗えません。
- ・カバーの洗濯は、洗濯機(水温40℃以下)・アイロン(110℃以下)・乾燥機(低温)が使用可能で、漂白剤・ドライクリーニングは使用できません。
- ・使用しないときは湿気の少ない場所に保管して下さい。

6. 材質

- ・カバー：綿
- ・本体の中身：菜種

定められた目的以外に本製品を使用することはできません。

正しくない取扱や不適切な使用を行うと事故を起こすことがありますので、十分ご注意下さい。

本品は5年を目処に交換されることをお奨めします。

本取扱説明書は大切に保管して下さい。

商品の仕様は変更することがあります。予めご了承ください。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-711-875 (フリーダイヤル)

 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**