

ベッド用シャンプートレイ

(CODE) 0-8103-01 (TYPE) H76428-0001

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品：

- シャンプートレイ・・・1台
- 排水ホース・・・・・・・・1ヶ
- プラスチックリング・・・1ヶ

用意するもの：

- A. シャンプートレイ（本製品）
- B. お湯を入れたピッチャー（2～3ヶ）
- C. シャンプーとコンディショナー
- D. タオル
- E. バケツ




使い方：

1. ベッド上部の中央に頭部がくるように寝かせます。
2. 枕を外します。
3. シャンプートレイを頭部下に差し入れます。首をくぼみに入れ、頭部を固定します。
4. 排水ホースを本体に接続し、反対側を床上に用意したバケツに入れます。
※洗髪中はホースをひねったり、圧迫しないでください。
※スムーズにバケツへ排水するよう、ホース位置を確認してください。
5. ピッチャーに入れてお湯で髪を濡らし、洗髪します。髪に洗剤が残らないよう、よく髪をすすいで下さい。
6. 髪や頭皮をお湯に浸して洗いたい場合、ホースの真ん中をねじって排水を止めます。付属のプラスチックリングで固定します。（右図参照）
7. 使用後は、本製品をよく拭いてから保管して下さい。

⚠ ご注意

- 誤った使用方法や無理な荷重は変型・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 使用中に破損が生じた場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用されますとケガの原因となります。

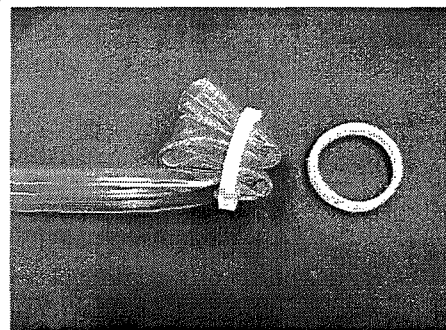

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
カスタマー相談センター 受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません