



湯たんぽ 0-8113-01

！やけど注意

《 使い方 》

- ボトルの首をつかんで固定し、ゆっくりとお湯を注いで下さい。
勢い良く入れますと、はねる恐れがあります。
- キャップは、しっかり締めて下さい。使用前に漏れがないか、確認して下さい。
- 湯たんぽを布袋などで包み、低温やけどを防止するため、肌から離してご使用下さい。
特に乳幼児・高齢者・病人が使用する時は、周りの方が注意して下さい。
- 氷水を入れて、水枕として使用することもできます。

《 注 意 》

- 熱湯を注がないで下さい。
製品自体に問題はありませんが、火傷をする恐れがあります。
- お湯は、ボトルの2/3を目安に入れて下さい。
- 電子レンジで使用しないで下さい。
- キャップは、専用のものをお使い下さい。
湯たんぽ用交換キャップ 商品コード：0-8113-11
- あやまってお子様がキャップを飲み込まぬようご注意ください。

〈 材 質 〉 本体：PVC(塩化ビニール)抗菌仕様
キャップ：PA(ポリアセタール)

■商品についてのお問い合わせは・・・

アズワン株式会社 カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。