


カラフル歩行器

(CODE)0-9841-01~02(TYPE)92017/92016

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みください。

外観図

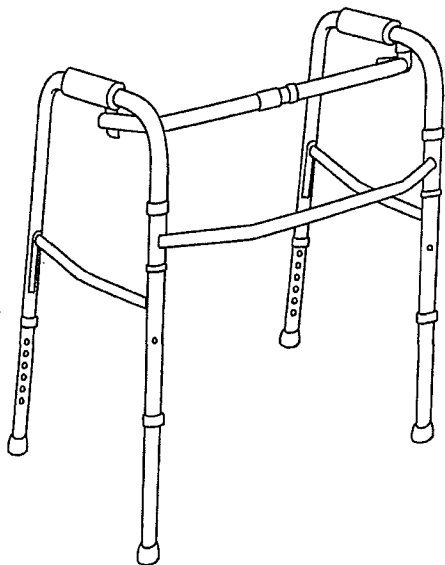


△ ご注意

- 誤った使用方法や無理な加重は変形・損傷の原因になりますのでおやめ下さい。
- 当製品を使用・移動する時は、段差などに十分注意し、静かに移動させて下さい。段差などに引っかかると、転倒し事故につながる可能性があります。
- ご使用前(少なくとも1ヶ月に一度)は各部に痛みがないか点検して下さい。
- 使用中に変形やネジのゆるみによりガタツキが生じた場合はすぐに使用を中止して下さいそのままだま使用されますとケガの原因になります。

組立方法


〈ロックの解除/固定〉

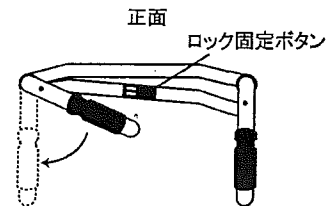

真上から見た図

- ・ロック固定ボタンを押すと、左右の脚の開閉が出来ます。
- ・足を完全に広げ、ロックボタンがカチリと音がした事を確認してからご使用下さい。
- ・たたむ時はロックボタンを押して行います。

〈脚の高さ調節〉

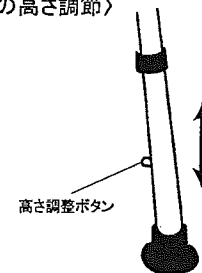

- ・高さ調整ボタンを押し込み4本とも希望する高さに合わせてください。

| | 型番 | 色 | サイズ(mm) | 重量 |
|-----------|-------|------|-----------------|-------|
| 0-9841-01 | 92017 | ピンク | 500×440×790~960 | 2.7kg |
| 0-9841-02 | 92016 | グリーン | | |

保証規定

- ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より6ヶ月間無償修理致します。
- ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ・ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理致します。

| | |
|--------|-------------|
| 品名 | カラフル歩行器 |
| 型式 | 92017,92016 |
| 保証期間 | お買上げ日より6ヶ月 |
| お買上げ日 | 年 月 |
| お名前 | |
| ご住所 | TEL. |
| 取り扱い店名 | 担当 |
| 住所 | TEL. |

● 商品に関するお問い合わせは、弊社「カスタマー相談センター」のフリーダイヤルにお電話ください。

カスタマー相談センター 0120-711-875 受付時間 9:00~12:00・13:00~17:30 (土・日・祝祭日及び当社休業日は除く)
0120-700-763

アズワン株式会社

初版2006年5月作成