

アルミ製便器いす

CODE 0-9853-01 TYPE 68200KD

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をお読みください。



<組み立て方>

- 左右両方の枠に各々背もたれ、前枠、後ろ枠を差込みます。
- 前枠、後ろ枠の中央に便器を乗せます。

<高さ調整>

- 高さ調節ロックボタンを押し、4本の足の高さを好みの高さに調節します。
- ※必ず4本とも同じ高さにしてください。

△ ご注意

- 定期的に(月一度以上)、各部にゆがみ、ガタがないか確認してください。
- 座面以外の部分に腰をかけないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 誤った使用方法や無理な荷重は変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 万一変形などによるガタが発見された場合には、直ちに使用を中止してください。
- 必ず水平な場所に設置し、がたつきがないことを確認してから使用して下さい。
- 腰掛けたままでの移動はおやめ下さい。部品が外れるなどして危険です。

保証規定

- ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より6ヶ月間無償修理致します。
- ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ・ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理致します。

品 名	アルミ製便器いす
型 式	68200KD
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日	年 月
お 名 前	
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当
住 所	TEL.

●商品に関するお問い合わせは、弊社「カスタマー相談センター」のフリーダイヤルにお電話ください。

カスタマー
相談センター
0120-711-875
0120-700-763

承り時間
9:00~12:00・13:00~17:30
(土・日・祝祭日及び当社休業日は除く)

アズワン株式会社

初版 2006 年 5 月作成