

取扱説明書

Instruction Manual

車椅子離床センサー

navis*


PA-CHAIR

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

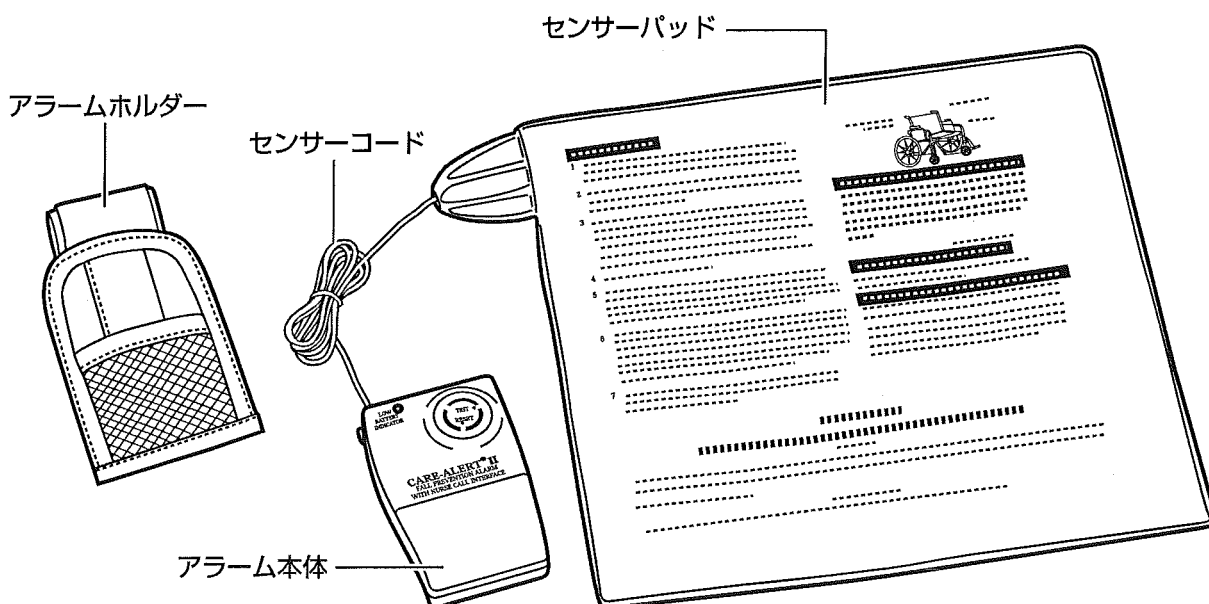

本製品は、あくまでも介助者ご自身が利用者の安全を見守るうえでの手助けをするものです。

安全を保証するものではありません。


万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承ください。

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 本製品は、介助者ご自身が利用者の安全を見守るうえでの手助けをするものです。
この用途以外で使用しないでください。
- 施設のガイドラインに従ってご使用ください。
- 他メーカーの機器に接続しないでください。
- アラーム本体やセンサーコードを、水や他の液体に濡らさないでください。
- センサーパッドには軽度の防水性がありますが、水または他の液体に浸さないでください。水や他の液体に浸してしまった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 濡れた手で操作しないでください。

- センサーパッドは常に平らな状態で使用し、折らないでください。鋭い突起上での使用は避けてください。
- 長時間ご使用にならない場合は、機器の作動・付属部品の状態を確認の上、ご使用ください。
- 使用前には必ずセンサーパッドをテスト作動させてください。
- ご使用の前に、センサーパッド、コードが破損していないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。
- アラーム本体を落下させたり、強い衝撃を加えたりしないでください。
- 火気を近づけたり、ストーブなどの高温になるところや直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 改造や修理は絶対にしないでください。
- 可燃性の液体やガスの近くでは使用しないでください。

各部の名称

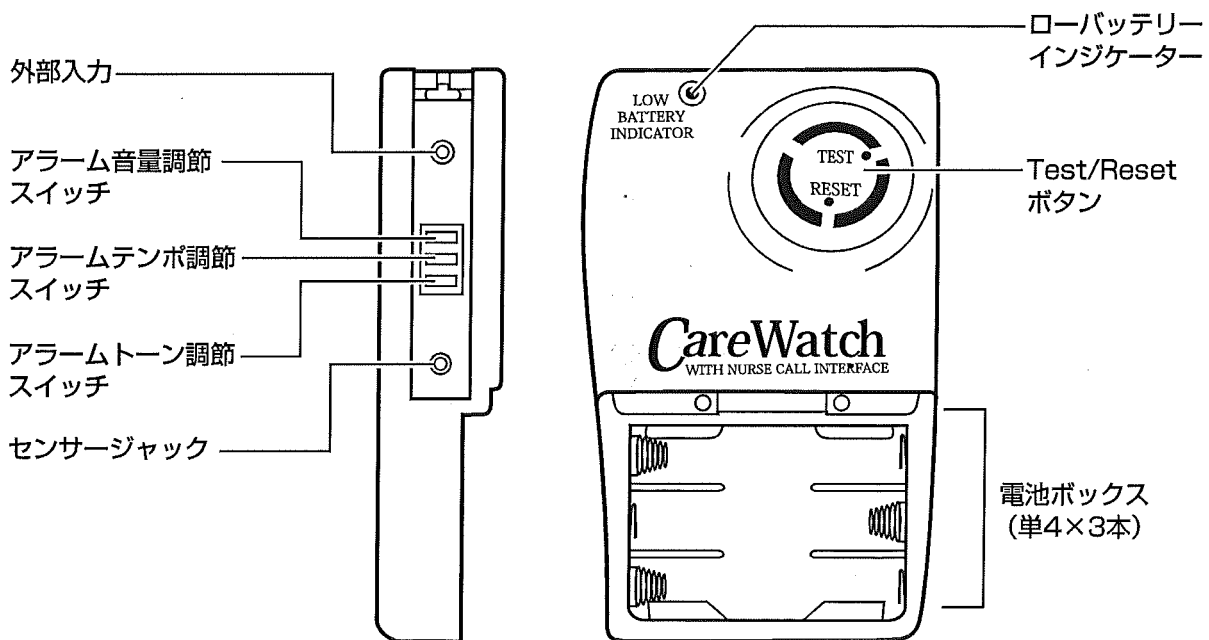

ご使用方法

- 1 センサーパッドを利用者のお尻の下に来るように置いてください。
車椅子クッションを使用する場合は、クッションの上にセンサーパッドを置いてください。
- 2 ドライバーでアラーム本体の電池ボックスカバーを開け、単4電池3本を＋に合わせて入れます。
電池を入れるとアラームが鳴り出しますので、Resetの下にある赤い丸印を1.5～2秒以内に3回押してアラーム音を止めてください。
電池ボックスカバーを元の位置に戻し、ネジ止めします。

- 3** 左側フタのネジを緩め、スライドしながら開けます。ペン先などを利用してアラーム音を調節してください。
- ① アラーム音量 : 高い (90デシベル) / 低い (70デシベル)
 - ② アラームテンポ : 速い/遅い
 - ③ アラームトーン : 高い/低い
- 4** センサーコードをセンサージャックに差し込み、左側フタ上部の穴に通します。
※アラーム本体からセンサーピンを外すときは、必ず白のタブをまっすぐ上に引いてください。斜めから引き抜かないでください。センサーコードが破損する恐れがあります。
- 5** 左側フタを元の位置に戻し、ネジ止めします。
- 6** アラームホルダーを車椅子の背もたれ部に取り付けます。
※利用者から見えない、手の届かない位置で、かつ介助者が操作しやすい位置に取り付けてください。
アラーム本体をアラームホルダーにセットします。アラーム本体の背面にあるマジックテープでアラームホルダーに固定してください。
※センサーコードが人の足や車輪などにかからないようにしてください。
- 7** 利用者をセンサーパッドの上に座らせます。
- 8** Test/Resetボタンを押してバッテリーと正常作動のテストをします。
正常作動しているとアラームが4回鳴り、通常モードになります。もし利用者が1～2秒以上センサーパッドの適した位置に座っていない場合はアラームが鳴り続けます。
利用者が正しい位置に座るとアラームは自動的に止まります。
- 9** 以降は利用者がセンサーパッドから離れるとアラームが鳴ります。介助者が利用者を移乗する際など、アラームを止める場合はReset下の赤い丸印ボタンを1.5～2秒以内に3回押すとアラームが止まります。再度、利用者がセンサーパッドに座りなおすと自動的に通常モードに戻ります。

注意

- 作動テストを毎日行い、正常に作動しているか確認してください。
- 使用中も適切に設置・正常に作動しているか定期的に確認してください。
- 使用中もセンサーコードが人の足や車輪などに絡まないよう定期的に確認してください。
- ローバッテリーインジケーターが点灯したら、電池を交換してください。

センサーパッドのお手入れ方法

- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。その後十分に乾燥させてください。
- アルコールによる清拭は、センサーパッド表面を傷めますので避けてください。

仕様

品番		8-1260-01
型番		PA-CHAIR
サイズ	センサーパッド	290×290×12mm
	アラーム本体	70×110×29mm
電源		単4乾電池×3本（テスト用付属）
音量調節		2段階（70dB・90dB）
機能		アラームテンポ調節、アラームトーン調節、ローバッテリー表示
材質		センサーパッド／PVC（防水加工）
コード長さ		880mm
付属品		アラームホルダー

Made in TAIWAN

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	車椅子離床センサー
型 式	PA-CHAIR
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875（フリーダイヤル）



FAX 0120-700-763（フリーダイヤル）



問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社

第1版2010年3月作成