


A-BOXフタの取り付け説明書

- ① イ)図1のように本体の穴の位置とフタの爪の位置を合わせるようにセットします。
 その際、本体のラベル貼付してある面を正面にして、フタは仮止めボタンのある方を正面、スライダーのある方を奥側にして、組立ててください。

ロ)フタの爪 ① を本体の穴 ① に、はめ込みます。
 (片側3箇所の穴と爪があります。)

ハ)片側ずつ、はめ込みます。

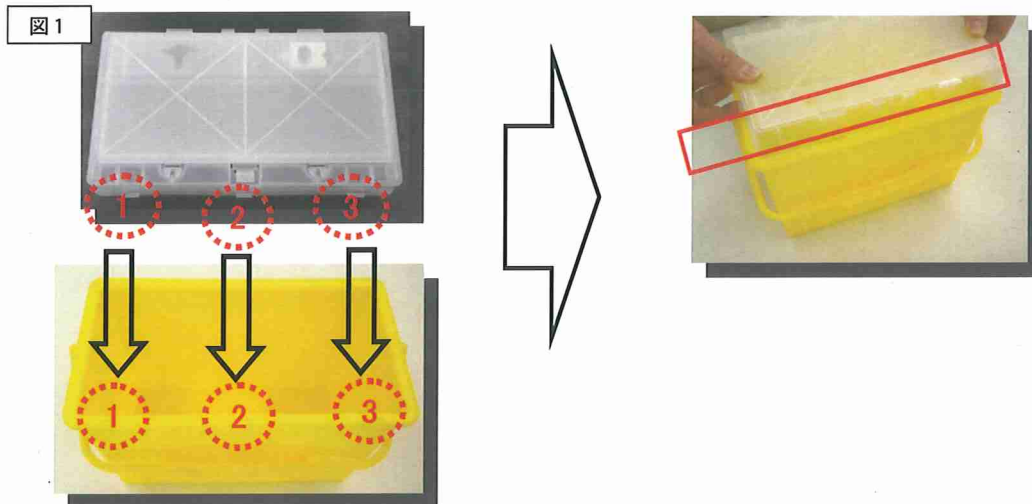


② はめ込みの仕方

イ)図2のように ① から順に、はめ込みます。

ロ)図2のようにはめ込む際、両手の親指でフタを押さえ、
 本体の縁を残りの指で支え、握るように力を加えて
 「カチッ」と音が鳴るまで確実に押し込みます。

- ③ 片側のはめ込みが終わればもう一方も同じ要領で行って下さい。

- ④ 最後に全ての爪がしっかりと本体にはまっているか、
 ご確認の上ご使用下さい。

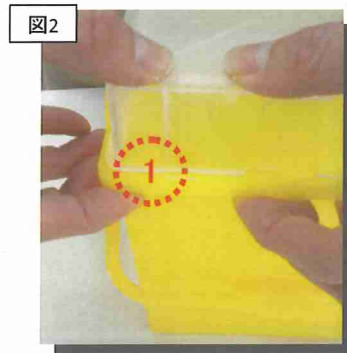


※ 安全の為に、仮フタは極力閉めてご使用下さい。

※ 廃棄の際は、ロック部の爪を90度に折り曲げて
 穴にはめ込み、フタが開かないことを確認して
 医療廃棄物として捨ててください。




A-BOX スライダーの使い方

ロック式の注射針などを外す際に、スライダーをご使用下さい。

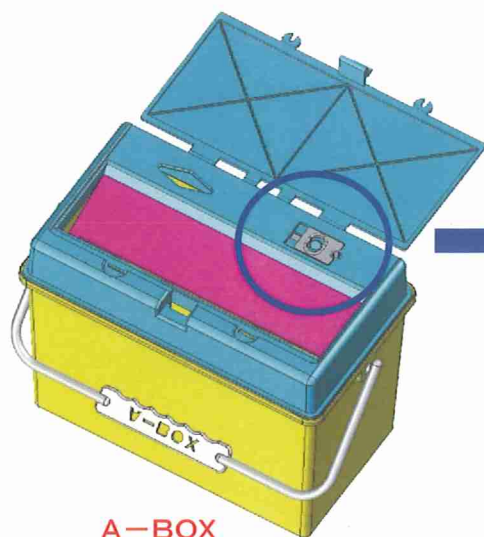


A-BOX

拡大図

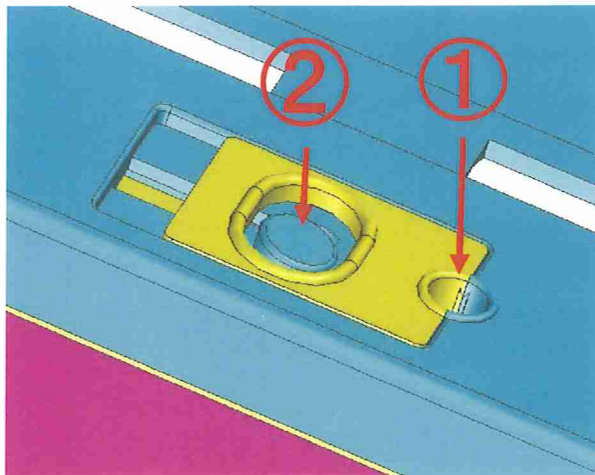

- 1 スライダーを右に動かし閉じた状態で、
①に注射針を挿入し、本体を回して
針を外してください。
- 2 ②のボタンを押しながら、スライダーを
左に引くと、針が自然に落下します。
- 3 使用後は、次の作業の為に、スライダーを
右に戻してください。

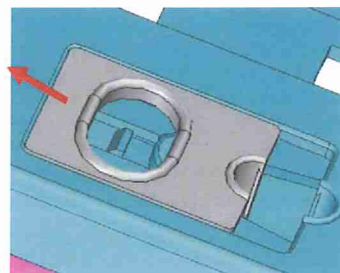

スライドボタンが開いた状態



兄弟分の8-9523-01
D-BOX(1ℓ)も発売中です！