

# 取扱説明書

Instruction Manual

## オムツ交換車（カバードタイプ）

NOC-C1 ■  
NOC-C2



### お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

## ⚠ 警告



### 禁止事項

- 本商品を用途以外には使用しないでください。倒れたり破損することで、けがの原因となります。
- 本体や他の部分に、強い衝撃や無理な力を与えないでください。破損やひずみが生じたり、転倒してケガをする恐れがあります。
- 改造及び分解はしないでください。倒れたり破損することで、けがの原因となります。
- 商品に座ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒しけがをすることがあります。


## ⚠ 注意



### 禁止事項


- 商品は水平で安定したところに設置してください。転倒、破損により、けがの原因となることがあります。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。転倒、破損により、けがをすることがあります。
- 近くに火気又は加熱物質を置かないでください。
- 本商品を屋外では使用しないでください。

## <オムツ交換車の各部名称>

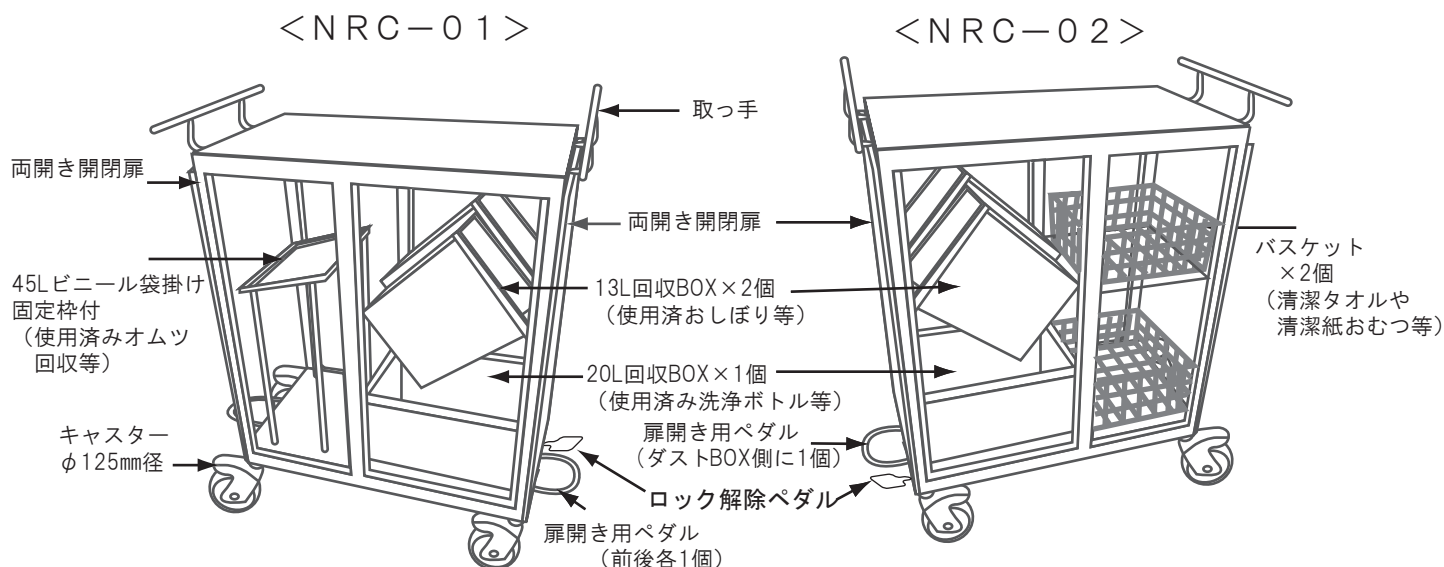

## <オムツ交換車の操作方法>

### <扉の開閉方法>

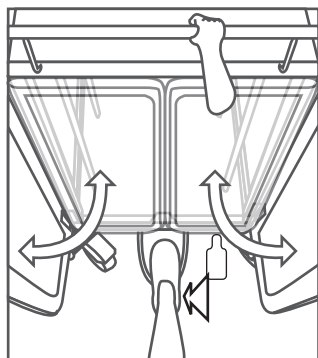


- ペダルを扉が開いた状態でロックするまで踏みます。
  - ロック解除ペダルを踏むとロックが解除され扉が開まります。
- 注意** ⚠
- 操作により予期せぬことが生じる可能性がありますので安全のため下記のことは必ず守ってください。
- 操作するときは必ず取っ手を握ってください。
  - ペダルを踏むときに足を扉の開閉範囲に入らないようにしてください。
  - ペダルを踏むときにきつく又は勢いよく踏まないでください。

### <45Lビニール袋の掛け方>

#### ビニール袋押さえ枠



- 枠にビニールを被せます。
- ビニールは上で折り返します。
- 押さえ枠を上から枠に被せセット完了です。

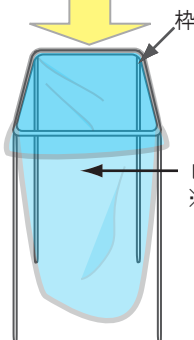

- ビニール袋
- ※ ビニール袋は付属しておりませんので、45Lのものをご用意ください。

## お手入れ方法

- ・ 清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。
- ・ 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。
- ・ 本商品に、クレンザー（磨き粉）、有機溶剤（シンナー、トルエン、酢酸等）及び強酸類等の薬品は、絶対に使用しないでください。

## 仕様

- ・ 材質：フレーム／スチール（粉体塗装）、天板／アルミ樹脂複合板、カバー／ABS樹脂
- ・ キャスター：φ125mmウレタン（対角ストッパー付）
- ・ 汚物ペール：材質／PP（ポリプロピレン）

### ● 付属品

- ・ NOC-C1 ・ 汚物ペール角13l×2／角20l×1、45Lポリ袋枠
- ・ NOC-C2 ・ 汚物ペール角13l×2／角20l×1、バスケット×2

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	オムツ交換車「カバードタイプ」		
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL：		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL：		

**アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**アズワン株式会社**

#### ■商品についてのお問い合わせは

##### カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

##### テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535  
FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2013 年 1 月第 2 版作成