

取扱説明書

Instruction Manual


マニュアルストレッチャー

navis


8-2230-01 LS-3C

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
この製品は搬送用のストレッチャーとして設計されています。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

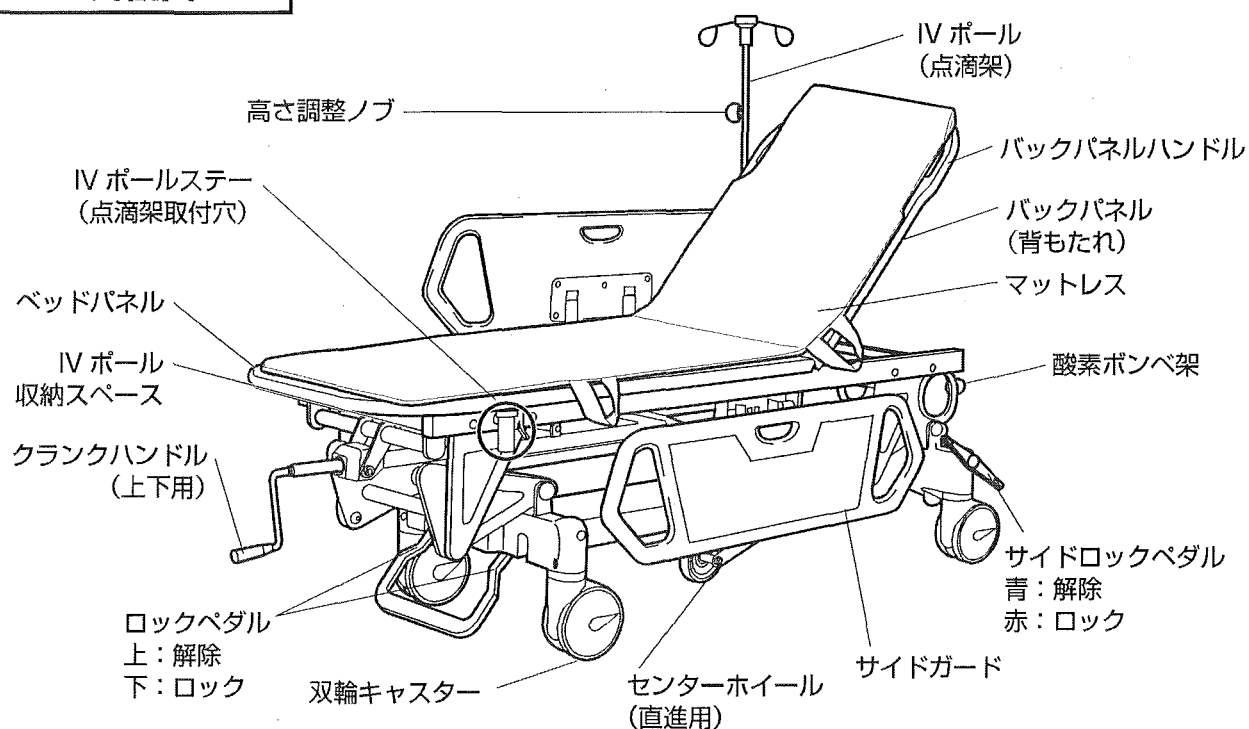

※IV ポール収納スペースはベッドパネル下の筒状スペースになります。

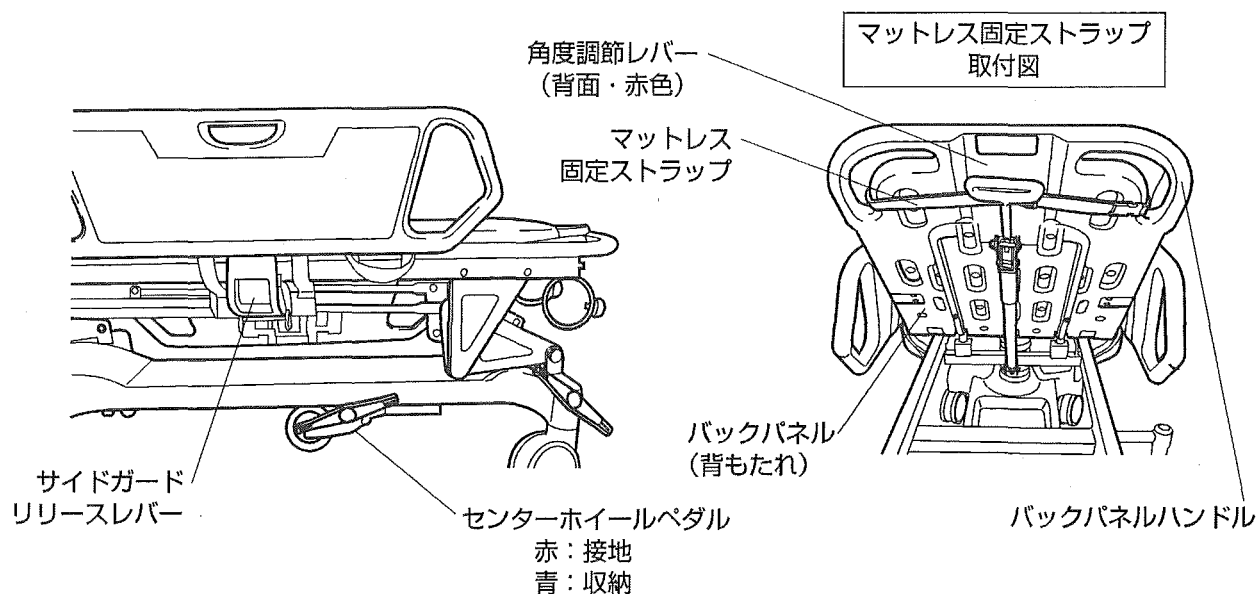

ご使用の前に（安全上の警告・注意）

出荷時に十分に検査しておりますが、ご使用いただく前には安全のため、都度点検をお願いします。ストレッチャーに付属している各部品がきちんと付いているか、各部品に傷やねじれ等の症状はないか、使用しているうちに各機能のガタつきや不具合はないか、点検をお願いします。もし異常がありましたら使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは弊社まで御連絡ください。

⚠ 警告 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外の目的に使用しないでください。
- 本ストレッチャーは1人乗り専用です。定員以上の乗車をしないでください。
- ストレッチャーの損傷や事故・転倒によるケガをする原因となります。製品の強度・品質については手押しの平坦床面での使用を想定しています。また、体重220kg以上の人には使用しないでください。
- 本ストレッチャーはMRI用には設計していません。磁性体を含んだ金属を使用しておりますので、絶対にMRI室では、ご使用にならないでください。
- 故障・異常のあるときには使用しないでください。
故障や異常状態で使用すると、事故・転倒などによるケガの原因となります。
- 改造をしないでください。改造によりストレッチャーの部品の破損・脱落・折損などで安全性が低下して事故・転倒の原因となります。
- ストレッチャーに人を載せおろしする際には、平坦な場所で停止し、必ずロックペダルで4輪ともブレーキを掛けて固定していることを確認してください。
- ストレッチャーが固定されていないと転倒・転落してケガをする原因となります。
- ストレッチャーの上に立った状態で乗らないでください。転倒や破損の原因となります。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように載せてください。
- マットレスの片端に体重が掛かるような載せ方をして移動すると、走行バランスが悪く、転倒・転落してケガの原因となります。
- マットレスは担架ではありません。スライド用として設計されていますので、患者様を持ち上げて運搬しないでください。
- バックパネル（背もたれ）の角度を調節する際は、しっかりとバックパネル（背もたれ）が固定されている事を確認し、ご使用ください。
- 移動時にはサイドガードを左右両側とも上げ、ロックした状態で移動・運搬を行ってください。
ストレッチャーのサイドガードを下げた状態で移動・運搬すると、転倒・転落してケガの原因となります。
- IVポール（点滴架）には輸液・補液バッグやボトル以外のものを掛けないでください。安全のため、フックには5kg／本以上のものを掛けないでください。フックやポールにぶら下がったりしないでください。IVポールの高さ調整ノブはしっかりと締めてご使用ください。
- IVポール（点滴架）を使用しない時には、ベッドパネルの下のIVポール収納スペースに差し込んで保管してください。

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 階段・段差・ミゾ・長い上り坂・下り坂での使用は危険です。
ストレッチャーに乗っている人や介助している人がケガをする原因となります。
- エレベーターを使用する場合には、ドアの隙間に車輪を落としてこまないようにしてください。
無理に脱出しようとする、エレベーターやストレッチャーを破損し、患者様もケガをする原因となります。本体を持ち上げるように介助して脱出してください。

使用前／定期的に下記の各部の点検・整備・清掃を行ってください。

- 各部のボルト・ナットに緩みはありませんか？
- フレームやパイプに変形はありませんか？
- キャスターブレーキのロックは正しく掛かりますか？
- キャスターの回転は正常ですか？
- マットレスに傷や破損、ほつれはありませんか？
- 各部の清掃と可動部分の注油（市販の潤滑剤）をしてください。
- 普段と比べ、異常音・違和感はありませんか？

使用方法

ストレッチャー付属のマットレスを、1ページの「マットレス固定ストラップ取付図」の様に、固定ストラップのバックルでバックパネル（背もたれ）ハンドル内側に固定、長さを調整してください。

A) ロックペダル・サイドロックペダルの操作

停車・移乗時： キャスター集中ロックを掛けるとき

ロックペダルを下まで踏み込むか、サイドロックペダルの赤色側を踏み込んでください。双輪キャスターが旋回・前後回転ともに4輪全てフルロックされます。

搬送時： キャスター集中ロックを解除させるとき


ロックペダルを爪先などで上に上げるか、サイドロックペダルの青色側を踏み込んでください。双輪キャスターが旋回・前後回転ともに4輪全てフリーになります。

B) センターホイール（直進用）の操作

- センターホイール（直進用）は、走行の際、直進安定性を高めるための機能です。
- 直進走行をする際には、本体フレーム下部中央にあるセンターホイールペダルの「赤いマークのあるペダル」を踏み、センターホイールを接地させてください。移動の際ストレッチャーのふらつきを防止します。
- ベッドへ寄せる際などストレッチャーを左右に移動したい場合、センターホイールペダルの「青いマークのあるペダル」を強めに踏み込んでください。センターホイールが上がり、横方向に移動させることができます。

C) 上下用クランクハンドルの操作

- クランクハンドルをご使用の時には把手を上引き上げてください。
- クランクハンドルを右に廻すとベッド面が上に上がり、左に廻すと下に下がります。
- マットレスの高さを上下に調節してご使用ください。
- 使用しないときにはクランクハンドルの根元のスリーブ（筒）を手元に引きながら、ハンドルを倒して収納してください。

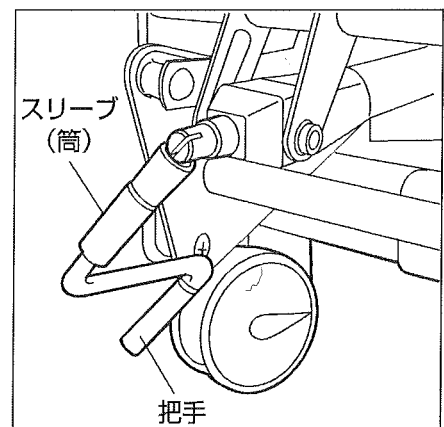

クランクハンドル収納時

D) バックパネル（背もたれ）の角度調節操作

- バックパネル（背もたれ）の裏にある赤い角度調節レバーを上握ってください。
- 握っている間、バックパネル（背もたれ）の角度を0～60°の間で任意に調節出来ます。
- 角度調節レバーを放せば、角度を設定出来ます。
- バックパネル（背もたれ）が、しっかりとロックされている事を確認し、ご使用ください。

E) サイドガードの操作

サイドガードは垂直方向のみ動きます。(※ウイングタイプではありません。)

⚠ 操作する際には指つめに充分ご注意ください。

使用する際： サイドガードの左右にあるハンドル部分を握りながら垂直に、ロックされるまで上げてください。


収納・移乗時： サイドガード中心下部の赤いリリースレバーを手前に引いて手を離してください。サイドガード機構部分にガスダンパーを使用していますので、ゆっくりと垂直に下がります。

F) IVボール（点滴架）使用方法

- IVボールはストレッチャー本体のバックパネル～ベッドパネルの下に収納スペースに入っております。
- ご使用の際には、収納部からIVボールを引き抜き、本体フレーム2箇所にあるIVボールステー（取付穴）のどちらかにしっかりと差し込み、固定レバーを下に下げてください。その上で、高さ調節ノブで任意の高さにしっかりと固定してください。

なお、フック部分には輸液・補液以外のものを掛けしないでください。(耐荷重：約5kg / 本)

ご使用しない時には、バックパネル～ベッドパネル下の(筒状の)収納スペースに奥まで収納して下さい。

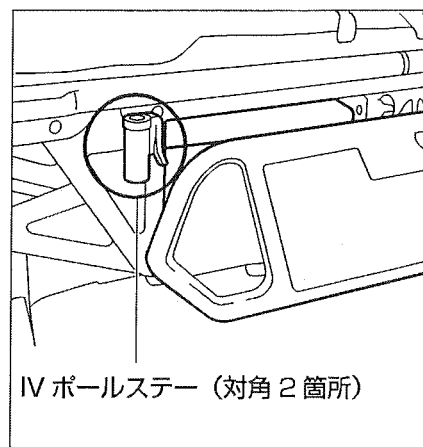


IV ボールステー（対角2箇所）

G) 酸素ボンベ架使用方法

酸素ボンベ（500L）を収納出来ます。収納する際には下図の酸素ボンベ架リングに酸素ボンベを収納してください。2箇所ある固定ノブを最後まで締め切ってください。

最後に、移動中に酸素ボンベが脱落することの無い様に再度固定されている事をご確認ください。

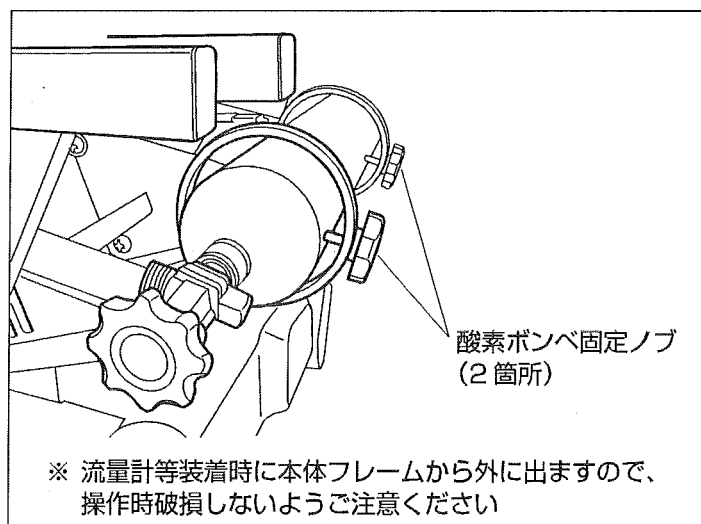

酸素ボンベ固定ノブ
(2箇所)

※ 流量計等装着時に本体フレームから外に出ますので、
操作時破損しないようご注意ください

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 酸素ボンベに加湿瓶付き流量計を装着した状態での走行は、壁や突起物に注意をしてください。破損の原因になり危険です。
- 使用後は必ずストレッチャーから酸素ボンベを取り外してください。
酸素の消耗や破損の原因になり危険です。


お手入れ方法

- 本商品を末永くご使用いただくために、定期的にお手入れしてください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き去ってください。汚れがひどい場合には、適度に薄めた中性洗剤を含ませた布で、ふき取ってください。その後、水で濡らした柔らかい布をよく絞り、洗剤をふき取って、最後に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
(※シンナー等の有機溶剤・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわし等はお使いにならないでください。)
- 標準マットレスはカバーとマットレスが分離できます。カバーのチャックを開けてマットレスの中身を引き出してください。カバーは洗濯機で洗うと布地を傷めますので、お止めください。
中性洗剤で手洗いし陰干ししてください。
なお、ハイターなどの次亜塩素酸ソーダは漂白作用があり、脱色する事がありますので、使用をお控えください。
普段のお手入れは、中性洗剤を浸した布でから拭きするか、アルコールなどで表面を清拭してください。

仕様

品番		8-2230-01
商品名及び型番		マニュアルストレッチャー LS-3C
本体外寸		W680（サイドパネル使用時）×L1900×H560～870mm（マットレス厚み除く）
ベッドサイズ		W630×L1910×H560～870mm（フラット時マットレス含まず） カートンサイズ／W705×L1950×H735mm（ハンドフォーク使用可）
マットレスサイズ		W590×L1780×t8mm（左右各2箇所スライド用グリップ付）
バックパネル調整角度		0～60°（ガスシリンダーによる任意角度調節式）
製品重量		79kg（マットレス・IVポール含む）
搬送耐荷重		約220kg
IVポールサイズ		使用時：全高880～1465mm、全幅／245mm、 パイプ径：上部／φ16mm 下部／φ19.2mm
キャスター径		双輪キャスター／φ150mm（双輪自在タイプ・セントラルロック式）×4 センターホイール／φ125mm（ゴム製・単輪固定タイプ）×1 最大有効内径：φ243mm 酸素ボンベ固定リング架間：243mm
酸素ボンベ適応サイズ		500ℓ用（圧縮3.4ℓ）※300ℓ用は使用不可。 最大有効内径：φ243mm 酸素ボンベ固定リング架間：243mm
付属品		IVポール（2本架）×1、標準マットレス×1
材質		フレーム／スチール（粉体塗装）、ベッドパネル・バックパネル・ サイドパネル／PE、マットレス／表面：キャンパス地（裏地：防水コーティング）、 マットレス表面外装：ナイロン、マットレス：EPE（発泡ポリエチレン）、 IVポール／スチールメッキ・ABS樹脂
オプション	8-2230-11	防水マットレスNBHC サイズ／W500xL1800xt20mm マットレス：PE（ポリエチレン） 材質／表：ビニールレザー（防水）、裏：ナイロン
	8-2230-12	バスケット取付金具（マグネット4個付） 材質／SUS304
	8-2176-13	アルティアバスケットHAB-75（アイボリー） サイズ／W400×D300×H75mm 材質／ABS樹脂（帯電防止剤入り）
	8-2230-13	交換用標準マットレス
	8-2230-14	交換用IVポール

寸法図

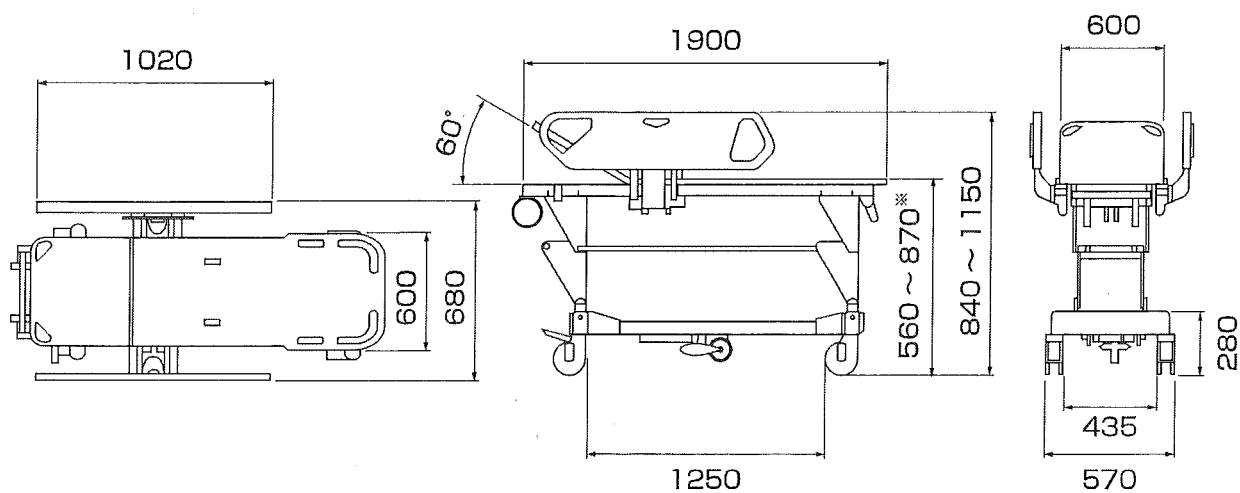

※ベット高にマットレス含まず。

(本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。)

Made in CHINA

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	マニュアルストレッチャー
型 式	LS-3C
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社