

navis*

PVCクリア湯たんぼ

8-9930-02 CHWB-W




取扱説明書

Instruction Manual

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。

使用方法

- 沸騰直後の熱湯を入れしないで下さい。沸騰させた場合は少しさしましたお湯（70℃程度）を2/3程度入れ、横に寝かせて空気を抜き、口栓をしつかり閉め、漏れないことを確認して下さい。
- 湯たんぼをカバーや布等でつつみ肌から離してご使用下さい。必ずカバー・布袋で包み、低温やけど防止のため、肌から離してご使用下さい。特に、乳幼児、老人、病人がご使用になる場合はご注意ください。
- 長期保管される場合は、乾燥させて保管して下さい。長期保管される場合は、表面の汚れを中性洗剤等で落とし、表裏とも水洗いして内部をつり下げて乾燥させた後、保管して下さい。

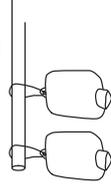

ご使用上の注意

- ⚠️ ■ 直接火にかけたり、鍋、電子レンジなどで暖めないで下さい。火災や、爆発などの事故につながります。絶対にお避け下さい。
- ⚠️ ■ 沸騰直後の熱湯を入れしないで下さい。沸騰直後の熱湯は注入時に危険を生じます。また、湯たんぼの劣化が早くなります。
- ⚠️ ■ 表面に油、薬品などを付けないで下さい。油や油性の薬品が付着しますと、膨潤や目に見えない劣化を起こします。
- ⚠️ ■ 直射日光や風の当たる場所等に放置しないで下さい。ひび割れなどの劣化が早くなります。また、物の上に置いた状態で保管しないで下さい。

お願い

製品をご使用中あるいは、長期保存中に変形、亀裂等が生じたり、粘着性を持つことがあります。このような場合にはご使用を中止し、お買い換えをお願いいたします。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

made in China 2015年10月第1版作成

navis*

PVCクリア湯たんぼ

8-9930-02 CHWB-W




取扱説明書

Instruction Manual

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。

使用方法

- 沸騰直後の熱湯を入れしないで下さい。沸騰させた場合は少しさしましたお湯（70℃程度）を2/3程度入れ、横に寝かせて空気を抜き、口栓をしつかり閉め、漏れないことを確認して下さい。
- 湯たんぼをカバーや布等でつつみ肌から離してご使用下さい。必ずカバー・布袋で包み、低温やけど防止のため、肌から離してご使用下さい。特に、乳幼児、老人、病人がご使用になる場合はご注意ください。
- 長期保管される場合は、乾燥させて保管して下さい。長期保管される場合は、表面の汚れを中性洗剤等で落とし、表裏とも水洗いして内部をつり下げて乾燥させた後、保管して下さい。

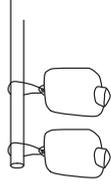

ご使用上の注意

- ⚠️ ■ 直接火にかけたり、鍋、電子レンジなどで暖めないで下さい。火災や、爆発などの事故につながります。絶対にお避け下さい。
- ⚠️ ■ 沸騰直後の熱湯を入れしないで下さい。沸騰直後の熱湯は注入時に危険を生じます。また、湯たんぼの劣化が早くなります。
- ⚠️ ■ 表面に油、薬品などを付けないで下さい。油や油性の薬品が付着しますと、膨潤や目に見えない劣化を起こします。
- ⚠️ ■ 直射日光や風の当たる場所等に放置しないで下さい。ひび割れなどの劣化が早くなります。また、物の上に置いた状態で保管しないで下さい。

お願い

製品をご使用中あるいは、長期保存中に変形、亀裂等が生じたり、粘着性を持つことがあります。このような場合にはご使用を中止し、お買い換えをお願いいたします。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

made in China 2015年10月第1版作成