

取扱説明書

Instruction Manual

かきむしり予防ミトン

KYM-S

KYM-M

KYM-L

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

● 取扱い注意


- ・ 本商品を、火気及び加熱されたものの近くには絶対に置かないで下さい。
- ・ 過度な力で引っ張ったり、鋭利なもので触れないで下さい。破れや変形の原因となります。
- ・ 本商品は、かきむしりを予防することを目的とし、皮膚のかゆみ、炎症などの症状を軽減することを目的としていません。

● 特長


- ・ アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症によって、無意識にかきむしってしまうことを防ぐ手袋です。
- ・ 内側の素材は、肌に優しい、日本アトピー協会推奨品のイオカC-21を使用しています。

● 洗濯方法/洗濯時の注意

- ・ 乾燥機はご使用いただけません。
- ・ マジックテープを留めてから洗濯して下さい。
- ・ 形を整えてから陰干しして下さい。

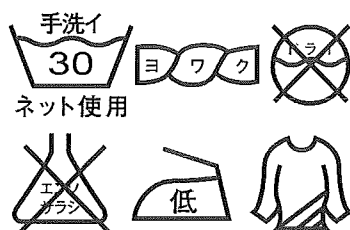

商品図

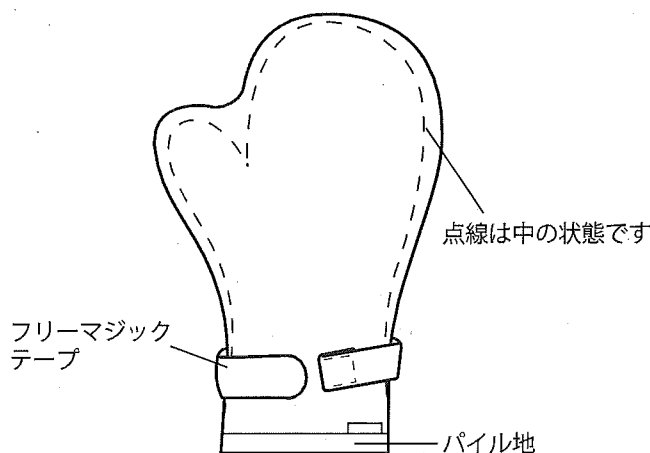

● 材質

内側：綿83%、イオカ17%（指定外繊維）
 外側：ポリエステル100%
 ベルト表地：ポリエステル100%
 ベルト裏地：マジックテープ

● 入り数：1双

● 内容物：本体（左右1枚ずつ）、取扱説明書

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません