

# カートクランプ

商品コード: 8-4488-01 クランプ

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

## 警告



### 禁止事項

- 本商品を用途以外には使用しないでください。折れたり破損することで、けがの原因となります。
- 改造及び分解はしないでください。折れたり破損することで、けがの原因となります。

## 注意



### 禁止事項

- 乱暴な取り扱いをしないでください。転倒、破損により、けがをすることがあります。
- 近くに火気又は加熱物質を置かないでください。
- 本商品を屋外では使用しないでください。

## 〈商品単体〉




## 〈取付イメージ〉



・左写真のようにパイプに取付けた後、オプションを取付けることが出来ます。  
※オプションを取り付ける際にはしっかりと差し込み、取付ノブをしっかりと締め、ガタがないことをご確認の上ご使用ください。

## 〈取付方法〉

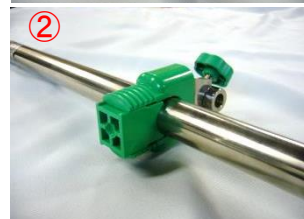

・上記写真①～③の手順で組み付け、最後に締付グリップをしっかりと締めつけてください。

## 特長

- ・カートや回診車に取り付けることで、オプションを後付することができます。

## 仕様

- ・材質 本体 ABS樹脂  
金具部 ステンレス(SUS304)
- ・取り付け可能パイプ φ19～25mm

## お手入れ方法

・本商品に、クレンザー(磨き粉)、有機溶剤(シンナー、トルエン、酢酸等)及び強酸類等の薬品は、絶対に使用しないでください。

・汚れを落とす場合には、うすめた中性洗剤を使用し拭き取ってください。

**アズワン株式会社**

商品に関するお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875



FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません



### 警告

- ・パイプ差込部とスパースでカート等のパイプをしっかりと組み、がたつきの無いようにしてください。
- ・ご使用前にがたつき等がなくしっかりと固定されていることをご確認ください。