




8-4771-01/02 レギュラー 2段・3段
8-4772-01/02 ラージ //

この度は本製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。

ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用頂けますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

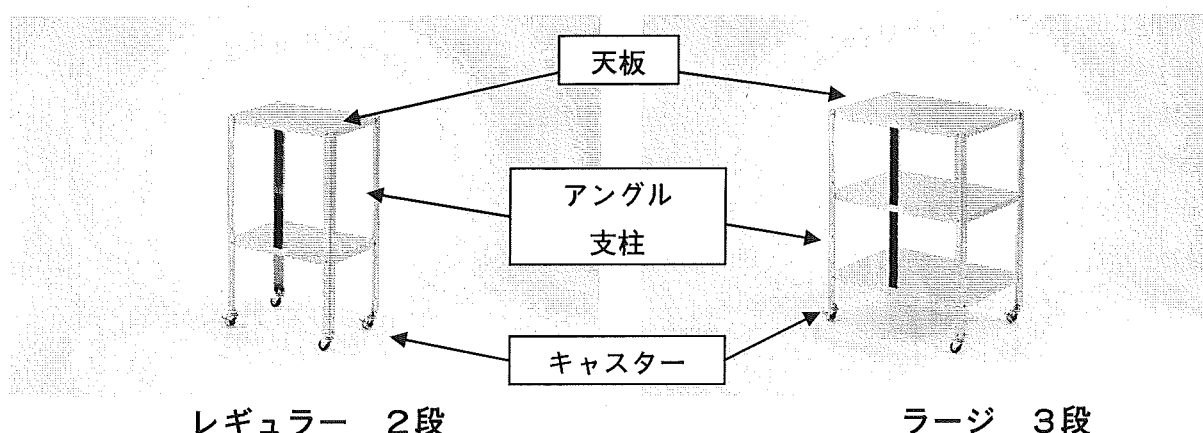

⚠ 注意

- ・ 本商品は器具等を運搬するためのワゴンです。人や動物などを乗せないでください。
- ・ 本取扱説明書明記の最大耐荷重（棚板あたり）を超える重量物を載せないでください。
- ・ 本説明書の組立方法にある通りにしっかりと＋ドライバーで組み立ててください。
- ・ 組立する際には、各部品の角の部分などでけがをしないようにご注意ください。
- ・ 定置する際には、予期しない移動を防止するため、キャスターのストッパーを2輪とも止めてください。
- ・ 使用・定置時には安全性に配慮し、平坦な場所でご使用ください。
- ・ 天板には表面の傷防止のためにブルーの保護フィルムを被せてありますので、組立時に保護フィルムを全てはがしてから、ご使用ください。
- ・ 本製品はステンレスでできておりますので、金属の特性上、塩素や酸の強い環境では腐食が起こることがあります。特に濃い塩素や酸系の薬品が金属表面に付着した場合には、出来るだけ早く拭き取ってください。
(消毒のための次亜塩素酸ソーダなどは、大きな影響はありません。)
- ・ タワシや磨き粉・研磨剤入りのスポンジ等での表面清浄は、ステンレス表面を傷つけることがあります。
- ・ 誤った使用方法や無理な加重は、変形・損傷の原因になりますのでお止めください。
- ・ 使用しているうちにねじが緩んでくることがありますので、定期的にねじの増し締めをしてください。
- ・ 使用中に変形やねじのゆるみによりガタツキが生じた場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用されますと事故の原因となります。

部品と数量

	【天板】	【アングル支柱（キャスター付）】	【ワッシャー付ネジ（+）】
レギュラー	2段 2枚	4本	16個
〃	3段 3枚	〃	24個
ラージ	2段 2枚	〃	16個
〃	3段 3枚	〃	24個

※ +ドライバーをご準備ください。

組立方法

- 1, 付属のワッシャー付ネジ（+）で付属の天板と、アングル支柱を固定します。アングル支柱は、キャスターの付いている方向を下側にしてください。
- 2, キャスターは対角の位置に設定し、一番上の天板よりアングル支柱をネジ止めしてください。
- 3, 中段（3段タイプのみ）・下段とアングル支柱に位置を決めて、同じ高さでネジ止めしてください。
- 4, ネジ止め箇所は、3段タイプは24カ所、2段タイプは16カ所、しっかり緩みの無いように締めてください。
- 5, 天板は逆さまにして、取り付けすることも可能です。（落下防止）
- 6, 全ネジ止め箇所がしっかりとしまっているか、棚板の高さが平行か、確実にご確認の上ご使用してください。

特長

- ステンレス製の組立式回診車です。
- ドライバー1本で組み立てでき、天板は落下防止機能のある折り曲げ面（H25mm）と通常面のどちらにも組み立て可能です。
- 天板高さは約51.8mm間隔で設定可能です。

仕様

CODE	8-4771-01/02、8-4772-01/02		
型 番	レギュラー	2段/3段、ラージ	2段/3段
寸 法	レギュラー/W460×D310×H809mm ラージ /W610×D410×H809mm (キャスター:φ40mm、ストッパー2個付)		
重 量	レギュラー	2段/4.7kg	、3段/5.8kg ラージ 2段/6.1kg
棚板あたり耐荷重	20kg/段		
材 質	天板・支柱/ステンレス SUS430 キャスター/ゴム製		

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、損害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・別材部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店名の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご負担頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ステンレスワゴン<組立式>
型 式	スモール / ラージ
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社