

品番：8-4983-01/02

リネントロリー

YC-91-J-0091, 0092

サイズ(幅×奥行×高さmm)

【-01】


590×428×872mm

【-02】

808×590×872mm



YC-31-J-00091

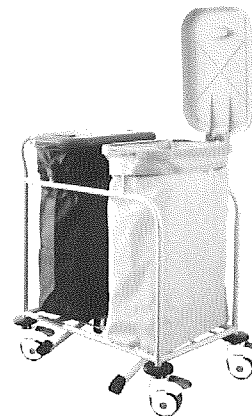

YC-31-J-00092

お買い上げ有り難うございます。
 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
 本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
 本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知らるために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

△ 注意



本商品に、クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものを絶対に使用しないでください。

取扱注意事項

- ・移動時にはエレベーター等の乗降の際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- ・平坦な床でご使用ください。
- ・分解・改造はしないでください。

特長

- ・リネン物の臭いを抑えるフタ付きです。
- ・フタは足踏み式ですので、両手がふさがった状態でも操作できます。
- ・ストッパー付きの大径キャスターで、移動も容易です。

仕様

- ・材質：本体/スチール(粉体塗装)、フタ/PP
- ・リネン袋/ナイロン帆布
- ・キャスター：φ100mm(2輪ストッパー付き)
- ・重量：〈-01〉9kg、〈-02〉14kg
- ・付属品：リネン袋 〈-01〉青×1枚、〈-02〉青・黄×各1枚

〈お手入れについて〉

清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

http://help.as-1.co.jp/q

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

Made in China

初版：2012年2月作成