

取扱説明書

Instruction Manual

車いすベルト[カーバックル式]

KBS


ご購入誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

●特長


- ・姿勢保持のためのベルトです。
- ・自動車のシートベルトに使用されているバックルと同等のものを使用しているので、装着時は安全で、取り外しの時には、ワンタッチでできることが特徴です。

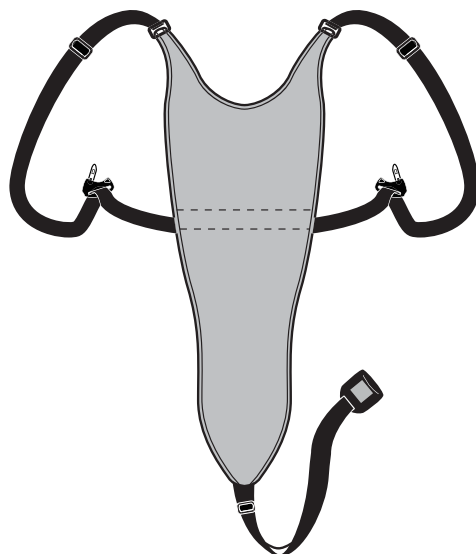


使用上のご注意

- ・普通型の車椅子以外には使用しないでください。
- ・リクライニング車椅子には使用しないで下さい。
- ・車椅子の座位保持以外の目的でのご使用はお止めください。
- ・看護者、介護者の目の届く範囲で使用してください。
- ・座面と背もたれが一体型の車椅子には使用しないでください。


使用方法

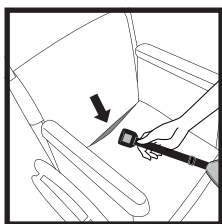


背シートと座シートの間にバックルの受け部分を入れ、背面に通す。

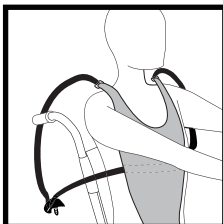

腕を左右のベルトの輪に通し、背面に回す。

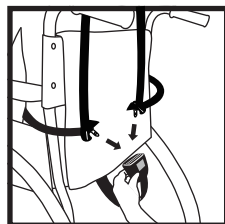

車椅子の背面でバックルを留める。

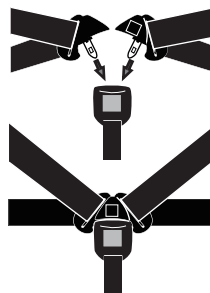

■バックルの留め方
凹バックルのボタンがついている側を正面にし、左側のバックルを後方の穴に差込み、次に右側のバックルを前方の穴に差し込んでください。

●サイズ

フリーサイズ: 適応身長目安 155～170cm

●素材

布地: ポリエステル100%

ベルト: ポリプロピレン

バックル: プラスチック、鉄

●洗濯方法

- ・布地の部分を洗う場合は、手洗いで洗濯してください。
- ・バックル部分は濡らさないようにご注意ください。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2013年11月初版