

診察台 7 - 3445 - 01 ~ 06 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は本製品の使い方とご使用上の注意を記載しています。ご使用前によくお読みの上、正しくお使い下さい。お読みになったあとも大切に保管し、わからない時にご再読下さい。

使用マークについて

本文中の△印付きの説明は安全性や製品の品質に関して特に重要な事項ですから、必ずお守り下さい。

△ 警告 — この事項を守らなければ、万一の場合死亡または重傷を負うことがあります。

△ 注意 — この事項を守らなければ、万一の場合傷害を負うことがあります。また、製品の破損や故障の原因にもなります。

△ 警告 安全にお使いいただくための警告

- この製品は診察台です。マッサージ台のような施術を行ったり、ロビーベンチのように2人以上座ったりしないで下さい。万一用途以外のご使用で事故を起こされても、責任は負いかねますのでご了承下さい。
- 診察台に立ち上がると不安定になり転倒するおそれがありますので、絶対に立ち上がらないで下さい。
- 折りたたみ脚は完全に開いた状態でお使い下さい（脚を完全に開くとカチッとロック音がしますので、このロック音を確認後ご使用下さい）。
- 廃棄する時は、専門業者におまかせ下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 滑りやすい床面、段差や傾斜のある場所などで使わないで下さい。転倒してケガをすることがあります。
- 改造は絶対に行わないで下さい。ケガや事故の原因となることがあります。


△ 注意 安全にお使いいただくための注意

- 可動部のすきまに手を入れないで下さい。ケガをすることがあります。
- 異常を発見したままや、ボルト・ねじがゆるんだまま、また、張り地やクッションが壊れたままで使用しないで下さい。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 直射日光の当たる場所や火のそばでの使用は避けて下さい。変色、変形または火災になることがあります。
- 可動部に注油しないで下さい。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをして下さい。ボルトやネジがゆるんだまま使用すると、本体が壊れてケガをすることがあります。

ご使用方法

■脚を開く方法


- ① 診察台を裏返します。
- ② 折りたたんである脚を垂直に開いて下さい（脚を完全に開くとカチッとロック音がします。このロック音を確認後、ご使用下さい）。

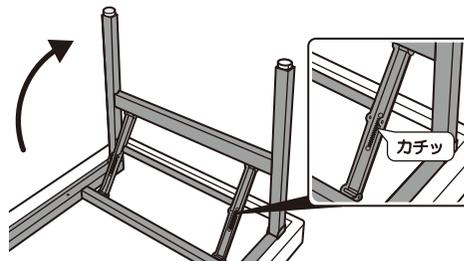

- ③ 診察台をゆっくり裏返し、起こして下さい。

■脚を折りたたむ方法

- ① 診察台を裏返します。
- ② 脚をおさえながらAのステーを押して、折りたたみます。

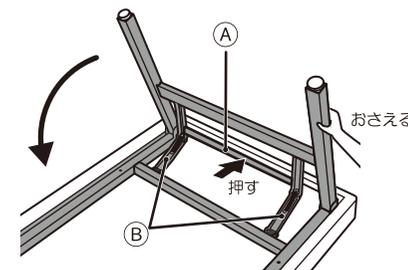

△ 注意 ②に指を挟まないよう、ご注意ください。

保証の明細

お使いの当社製品が、取扱説明書、本体添付のラベルなどの注意書きによる正常なご使用のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店にご連絡下さい。

■保障規定

1. 保証期間内の（お買い上げの日より1年間）に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
 - a - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障
 - b - 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - c - 消耗部品の消耗またはそれによる故障
 - d - 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
 - e - お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造などによる故障
 - f - 出張修理を行う場合の出張に要する費用
 - g - 追加部品（ネジ類など）またはお客様破損による追加部材などのご要望
3. 運賃などの諸費用はおお客様にご負担していただく場合があります。
 - ※製品の仕様及び外観は品質向上の為、予告なく変更されることがあります。