

取扱説明書

Instruction Manual

らくらく除圧グローブ

7-3449-01 グローブタイプ

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管して下さい。

使用上のご注意

●取扱注意事項

- ・使用方法が不適切な場合等において、生命、身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師、専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れ等皮膚に異常を感じた際は、直ぐ使用を中止して下さい。

●特長

- ・滑りやすい素材を使用しているため、移乗や背抜き、寝具及び衣服等の皺伸ばしに適しています。
- ・ポジショニング時の体圧の確認ができます。
- ・両側に親指用の穴が開いているためムレを防止し、且つ、脱げにくい仕様となっています。

●洗濯方法/洗濯時の注意


- ・シートは洗濯可、脱水及び乾燥機は使用できません。
- ・塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。
- ・蛍光増白剤を含む洗剤を使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますのでご注意下さい。
(水温60℃まで可)
- ・加工の性質上、洗濯をすると皺ができますが、品質には問題ございません。

●材質：ポリエステル 100%

●入り数：1枚入り

●寸法 480×170 mm (指通し穴：50 mm)

使用方法

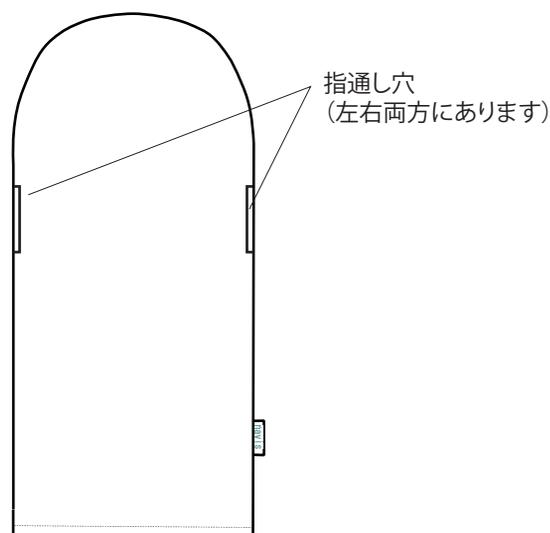

↑
手を入れる方向

▼使用例



AS ONE アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL: 0120-711-875 FAX: 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません