

# 取扱説明書

## Instruction Manual

# デイスポカフカバー


**navis**

**8-7568-01 DC540170**

**8-7568-02 DC480140**

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外観図

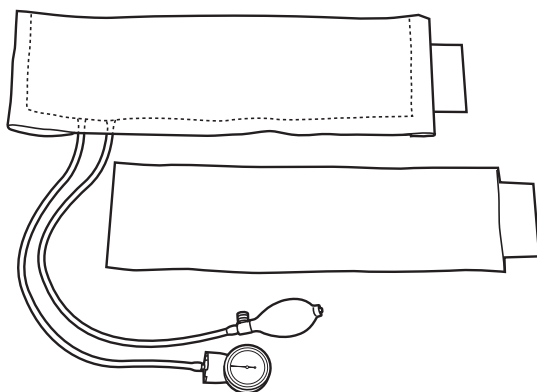

**⚠ 注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 本製品は不織布製でできた血圧計腕帯カフ用のカバーです。
- ご使用になられる血圧計腕帯カフのサイズに合わせて、大もしくは小サイズをご選定ください。
- 本製品の各サイズより大きな血圧計用腕帯カフはご使用頂けません。
- 本製品は交差感染対策を目的に企画されています。
- 本製品は特に医療機器ではありませんので、臨床試験はしておりません。そのため、血圧数値の際については本カフカバーを使用した場合／しない場合の数値については保証しておりませんので、予めご了承ください。

### 特長及び使用方法

- カフカバーは見た目以上に感染にさらされています。また、定期的に清拭・洗濯はなかなか実行できないものです。本商品は交差感染対策のため、まめに洗濯・消毒することができない血圧計カフを、汚れや汚染から守るために企画しました。
- 本製品の長い面（下側）に切れ込みがありますので、そこから布袋・ナイロン袋に入ったカフを挿入し、外観図のようにチューブを引き出し、通常のようにご使用ください。

## 仕様

|        |                |             |
|--------|----------------|-------------|
| 品番     | 8-7568-01      | 8-7568-02   |
| 型番     | DC540170       | DC480140    |
| カバーサイズ | 大：170×540mm    | 小：140×470mm |
| 材質     | PP製不織布／マジックテープ |             |
| 入数     | 50枚／袋入         |             |
| 大箱入数   | 20袋／箱          |             |

### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875（フリーダイヤル）



FAX 0120-700-763（フリーダイヤル）



<http://help.as-1.co.jp/q>



**アズワン株式会社**