

取扱説明書

Instruction Manual

navis*

とっても静かな救急カート

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
当社製品をより安全に、正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。
また、お読みいただきました後も無くさないよう大切に保管してください。


目次

使用上のご注意	P. 1
各部名称	P. 1
お手入れ方法	P. 2
オプションの取付方法	P. 2
製品仕様	P. 2
製品保証	P. 3

使用上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- 床面が平滑なところで使用してください。凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損したり、転倒の原因になります。
- エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 天板や補助天板への無理な荷重は、転倒や破損の原因になりますのでご注意ください。
- 引出しを出した状態で荷重がかかり過ぎますと、バランスを崩して転倒する恐れがあります。引出しを開ける際は、1段ずつ開けるようにしてください。
- 本体に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色する可能性があります。
- もし使用中に変形や曲がり、ねじの緩みなどによるガタツキや異音がした場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。
- 絶対に分解や改造はしないでください。

各部名称

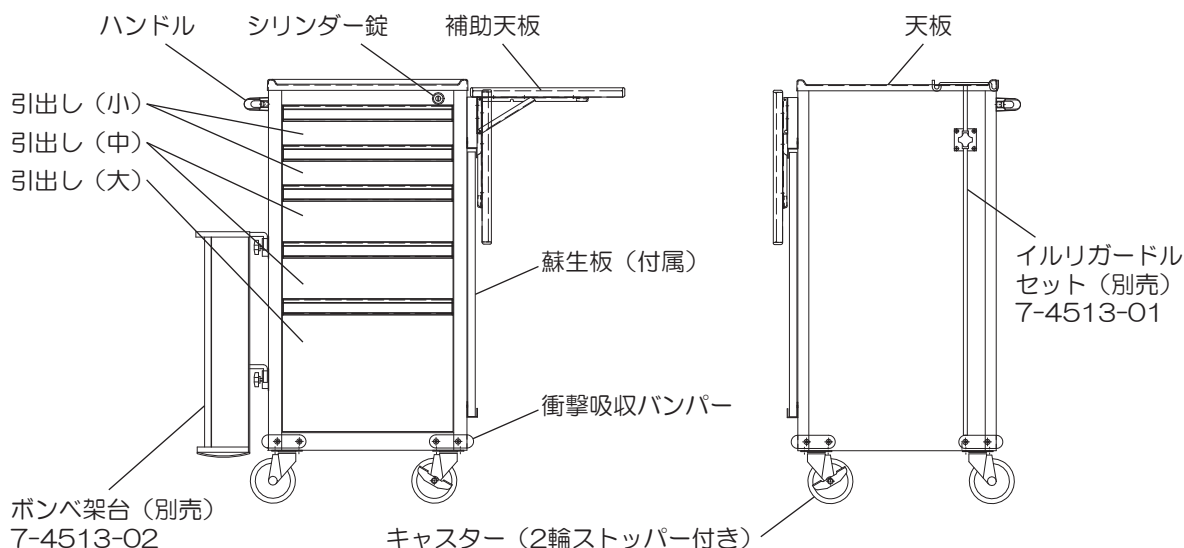


お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。


オプションの取付方法

①追加横仕切板（7-4512-11）

引出し（小）には仕切板がセットできます。横仕切板は追加でお買い求めいただくことができ、1列当たり最大17枚の横仕切板を取り付けることができます。（21.5mmピッチ）

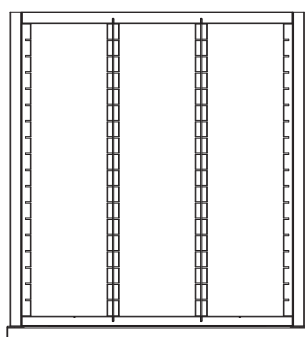


《横仕切板セット例》

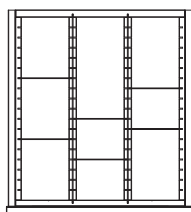


②イルリガードルセット（7-4513-01）、ポンベ架台（7-4513-02）

本体に付属する取付けネジを用いて、各オプションに付属のアタッチメント金具をプラスドライバーで取り付けてください。

《イルリガードルセット》

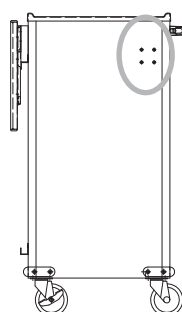

《ポンベ架台》

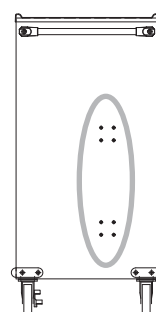

製品仕様

品 番	7-4512-01	
型 番	TSE-R	
本体寸法	（幅）560×（奥行）480×（高さ）961mm	
本体重量	50.5kg	
天板有効寸法	（幅）410×（奥行）410mm	
補助天板有効寸法	（幅）340×（奥行）430mm	
引出し 有効内寸法	（小）	（幅）333×（奥行）387×（高さ）72mm
	（中）	（幅）349×（奥行）387×（高さ）110.5mm
	（大）	（幅）349×（奥行）387×（高さ）283mm
キャスター	φ100mm静音強化キャスター（対角ストッパー付き）	
付 属 品	縦仕切板（引出し（小）用）	×4枚
	横仕切板（引出し（小）用）	×12枚
	蘇生板	×1枚
オプション品	追加横仕切板	7-4512-11
	イルリガードルセット	7-4513-01
	ポンベ架台	7-4513-02

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品 名			
型 式			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理 改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両 船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2017年 7月 初版作成