

取扱説明書 救急カート

商品コード : 7-4521-01
: 7-4521-02

型番 : AM930-R
型番 : AM930-B



オプション : 7-4521-11 仕切板小ヨコ : 7-4513-01 イルリガードルセット(2本フック)
: 7-4521-12 仕切板小タテ : 7-4513-02 ボンベ架台(500L用)
: 0-4558-11 蘇生板 15×400×600

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方をするために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

目次

使用上のご注意..... P1.2
各部名称 P2
オプション部品の取付方法・・P3
主要部品の材質..... P4

仕様..... P4
付属品 P4
お手入れ方法..... P4
製品保証について..... P4

■ご使用上の注意

⚠警告 この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。


- 引出しは上段にだけ収納しないでください。引出した時に倒れて怪我をすることがあります。
- 引出しは手前にだけ収納しないでください。引出した時に倒れて怪我をすることがあります。
- 引出しは一段ずつ引出してください。複数の引出しを同時に引出すと、倒れてけがをすることがあります。

⚠注意 この注意事項を守らなければ、傷害または物的損害が発生する可能性があります


- 引出した引出しに手などで力を加えないでください。倒れて怪我をすることがあります。
 - 本体や引出しの上に乗らないでください。転倒して怪我をすることがあります。
 - 手を引出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。手を挟んで怪我をすることがあります。
 - 鍵を差し込んだまま使用しないでください。怪我や衣服の破損の原因になります。
 - 分解や改造をしないでください。破損や怪我をすることがあります。
 - 乱暴な取扱いや用途以外に使用しないでください。故障や破損の原因になります。
 - ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じた場合は、早めに締め直してください。ゆるんだままですと本体の破損や転倒などで怪我をすることがあります。
 - 異常を発見したまま使用しないでください。本体の破損により怪我をすることがあります。
 - 耐荷重以上に収納しないでください。引出しが落下して怪我をすることがあります。
 - 本製品から離れる場合は、必ずキャスターのストッパーをロックしてください。
 - 床面が平滑なところで使用してください。
- 凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。

- 引出しを閉めてから鍵をかけてください。
- 樹脂ハンドルを持って移動してください。
- 本製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所では使用しないでください。
さびや故障、変色の原因になります。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 本体に薬品、水などをこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。
長時間放置しておくと変色の原因になります。
- エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。

＜各部名称＞


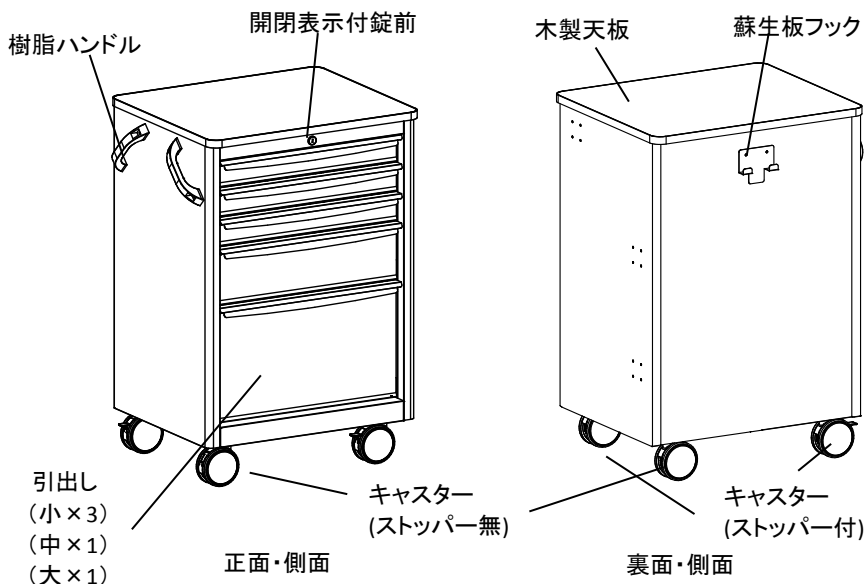


■オプション取付例



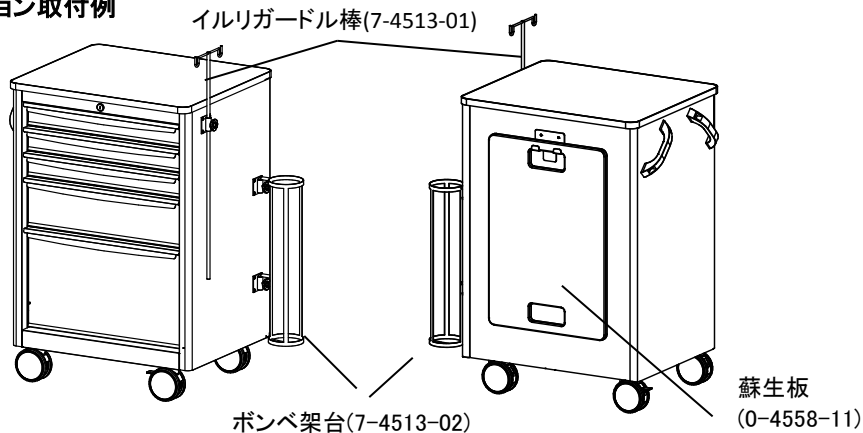


オプション部品の取付方法

◆蘇生板


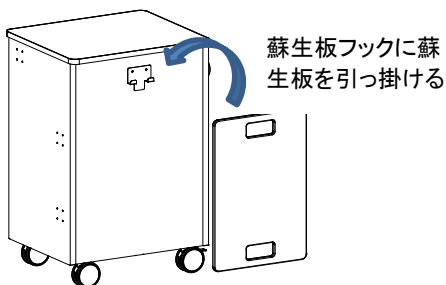
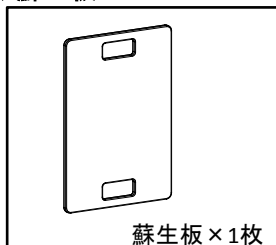


◆イルリガードル棒

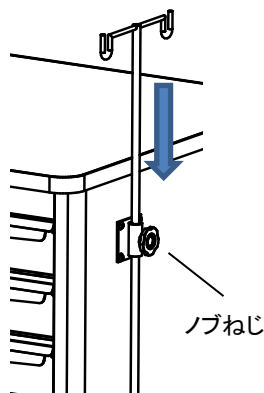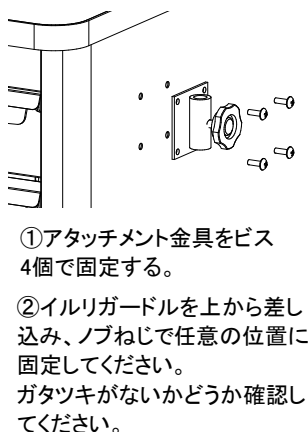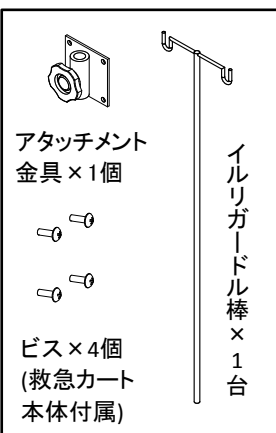

アタッチメント金具はイルリガードル棒に付属しています。

◆ボンベ架台

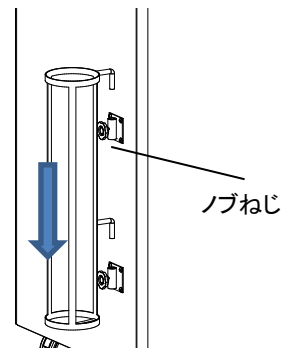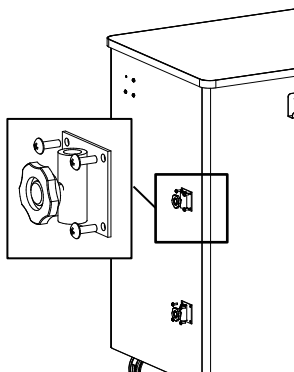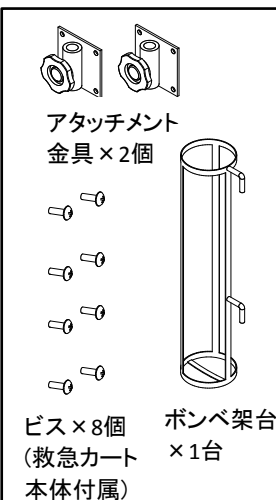

②ボンベ架台を上から差し込み、ノブねじで固定してください。
ガタツキがないかどうか確認してください。

アタッチメント金具はボンベ架台に付属しています。

■主要部品の材質

本体 : スチール
 木天板 : 表面/メラミン化粧板
 芯材/パーチクルボード
 縁材/ABS樹脂
 樹脂ハンドル : ABS樹脂
 キャスター : 本体/ナイロン 車輪/エラストマー

■仕様

製品サイズ : W600 × D470 × D930mm
 製品重量 : 57kg
 引出内寸法 : (小)W483.4 × D397.2 × H68mm
 : (中)W483.4 × D406.4 × H146mm
 : (大)W483.4 × D406.4 × H302mm
 引出耐荷重 : 25kg
 天板サイズ : W606 × D516 × H20mm耐荷重100kg

■付属品

仕切板小ヨコ×6枚、仕切板小タテ×6枚、ビス×12個、鍵×2個、取扱説明書(本書)

■お手入れ方法

- 汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 漂白剤・クレンザー・ベンジン・シンナー・アルコール等は、使用しないでください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名

型式

型番

保証期間 お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

お客様 様

ご住所 TEL:

取扱い店名 担当者印

住所 TEL:

アズワン株式会社

〈保証規定〉

(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。

(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

・誤使用、不当な修理・改造による故障。

・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。

・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。

・車両・船舶等での使用による故障。

・消耗部品、付属部品の交換。

・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合、

(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。

(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

お問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせ

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

お問い合わせ
専用 E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30

土・日・祝日及び弊社休日はご利用できません。

2017年7月 第1版 作成