


ベッドサイドテーブルLBT9045 取扱説明書


この度は、本商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、お読み頂きました後も大切に保管してください。


1. 部品確認

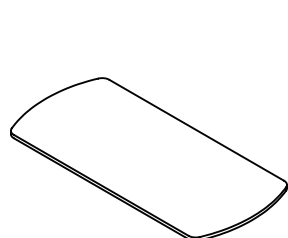

天板(1枚)

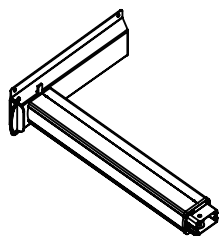

支柱(1本)

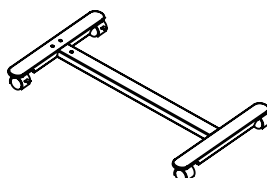

脚部(1個)



六角穴付きネジM5X10(4本)



M5ネジ用ワッシャー(4個)



六角穴付きネジM8X50(3本)



M8ネジ用ワッシャー(3個)




六角レンチ3mm



六角レンチ5mm

使用工具

2. 組立図

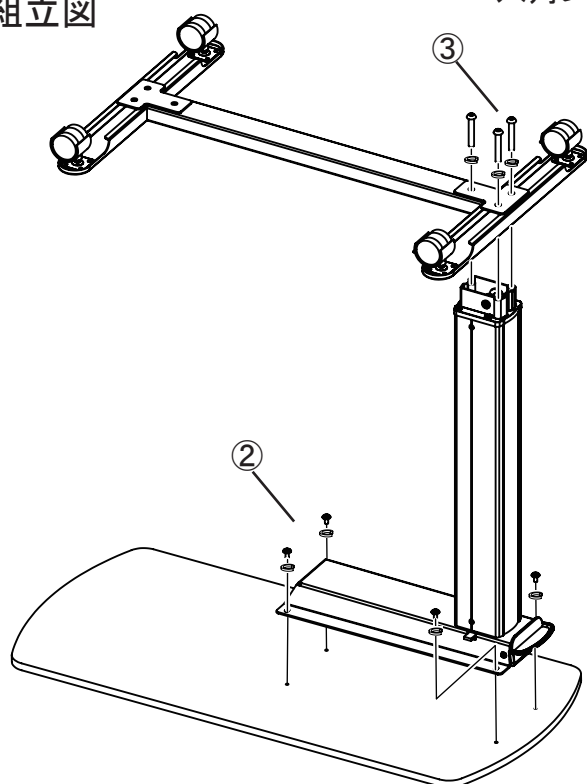


① 紙等を床面に敷いて、その上に天板を下にし、支柱取り付け面が上になる様に置いてください。

② 左図のように支柱を、天板にM5×10ネジとM5用ワッシャーで取り付け、仮固定をしてください。(4ヶ所)

③ 左図のように脚部を、支柱にM8×50ネジとM8用ワッシャーで取り付けて、仮固定をして下さい。(3ヶ所)

④ 仮固定ができたなら、支柱、脚部の歪みがない様に、各部のネジをしっかりと締めてください。(7ヶ所)
この際、ネジ山がつぶれないように、ネジの締め過ぎには、ご注意ください。

⑤ 下図のようにひっくり返して、支柱、脚部がしっかり固定されていることを確認してください。

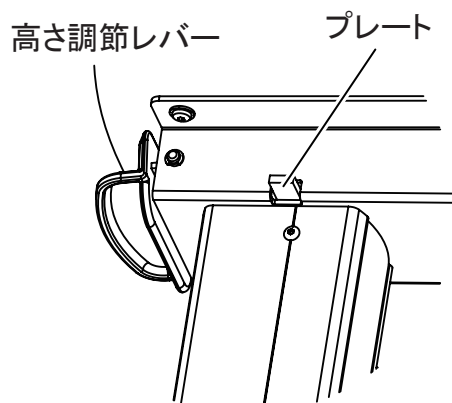


ご使用の前に必ずプレートを引き抜いてください。

高さ調節の方法

- 高さ調節レバーを引き上げながら、お好みの高さに調節してください。高さ調節レバーを離すとその位置で固定されます。

高さ調節レバーを引き上げていない場合でも、天板を下から押すとテーブルの高さが上がります。これは安全機構によるもので故障ではありません。

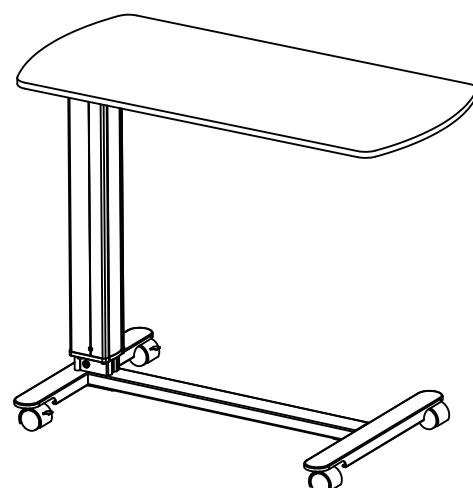

3. 仕様

型番	LBT9045
幅×長さ×高さ	855×445×685-1070mm
テーブルサイズ	850×395mm
ベース高さ	56mm
材質	本体／アルミ、天板／MDF化粧板
キャスター	φ40mmナイロン製(2輪ストッパー付)
昇降方式	ガス圧シリンダー
耐荷重	20kg
重量	14.5kg
その他	組立式
付属品	組立工具(六角レンチ)

Made in China

4. 使用上の注意

- 本製品をテーブル以外の用途で使用しないでください。歩行器や手すり等の目的で使用すると、転倒してケガをしたり、テーブルが破損、変形したりする恐れがあります。
- 天板の上に物を載せたまま、上下動や移動をさせないでください。
- 床面が平坦なところで使用してください。凸凹のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。
- エレベーター等の乗降りの際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 無理な荷重は転倒や破損の原因になります。(耐荷重20kg)
- 使用時は各部のネジがしっかり固定されていることを確認してください。
- 天板の上に液体などがこぼれた場合、すみやかに拭き取ってください。天板表面の剥がれやシミの原因になる恐れがあります。
- 使用中に変形や曲がり、ネジのゆるみなどによるガタツキや異音が出た場合は、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落によりケガをする恐れがあります。
- 操作を理解できないと思われる方や、体位を自分で保持できない方には、高さ調節レバーを操作させないでください。誤って操作したり、操作した際にバランスをくずしたりして、転落・転倒の恐れがあります。
- テーブルをベッドに設置している時は、ベッドの操作をしないでください。思わぬケガをしたり、テーブルやベッド、ベッド用オプションが破損、変形したりする恐れがあります。
- テーブルに寄りかからないでください。転倒してケガをしたり、テーブルが破損、変形したりする恐れがあります。
- テーブルの高さを調節する場合は、天板に手を添えて操作してください。高さ調節レバーだけを操作すると急にテーブルが上がり、ケガをする恐れがあります。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は弊社保証規定により修理いたします。

品名	ベッドサイドテーブル		
型式	LBT9045		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL		

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは
修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

第1版 2017年11月作成