



取扱説明書

点滴万能処置車 A型 (0-226-01)

特徴

- 点滴を患者別に管理したり処置台としても使用出来ます。
- リンゲル架けをはずせば回診車としてお使いいただけます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 処置台として使用する際は、キャスターストッパーを掛けて下さい。
- ⑤ 天板への耐荷重は30kgですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑥ 上段及びリンゲル架けだけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意願います。
- ⑦ 引出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。抜け落ちる恐れがあります。
- ⑧ リンゲル架けはリンゲルを吊るす以外の目的で使用しないで下さい。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル		0120-711-875
	F A X	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		