

取扱説明書


バイタルナビ聴診器

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

使用上の注意

- ・本取扱説明書に記載されている用途以外に使用しないでください。
- ・イヤープースが耳管に装着されていない場合は使用しないでください。またイヤープース交換時は、ケガをしないよう注意してください。
- ・本品を装着する際は両手で耳管を持ち、外耳を傷つけないようゆっくりと装着してください。
- ・材質などに過敏症のある患者には使用しないでください。
- ・創傷部位にチェストピースを当てないでください。
- ・改造および分解はしないでください。
- ・極度の高温・低温は避け、溶剤やオイルは使用しないでください。
- ・浸漬・滅菌はしないでください。

製品仕様

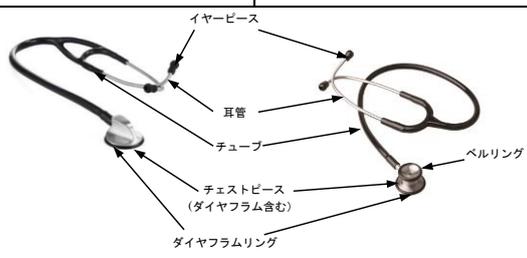品名	バイタルナビ聴診器 (カーディオロジー(シングル))	バイタルナビ聴診器 (プロフェッショナル)
各部名称		
付属品	交換用ソフトシーリングイヤープース(4個入)、 取扱説明書、添付文書	交換用ダイヤフラム、 交換用ソフトシーリングイヤープース(2個入)、 取扱説明書、添付文書

使用方法等


【使用方法】

- (1) 耳孔に合わせイヤープースを耳に装着してください。
装着の際はチューブが前を向いた状態になるよう装着してください。(右図参照)



- (2) チェストピースを聴きたい面に合わせ静かに生体音の聴取を行ってください。

※カーディオロジー(シングル)は、同一面で低・高周波音の両方を聴診可能なサスペンデッド・ダイヤフラムを採用しています。低周波音を聴診するにはチェストピースを皮膚に軽く押し当て、高周波音を聴診するにはチェストピースを皮膚に強く押し当てて聴診します。

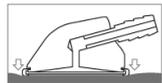

チェストピース断面図
(カーディオロジー(シングル))

【耳管の調節方法】

耳管のテンションを弱める場合は、左右の耳管を図1の様につかみ、ゆっくりと広げてください。強める場合は、左右の耳管を図2の様につかみ、お好みの強さになるまで調整してください。

図1

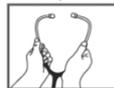


図2



【イヤープース交換方法】

<プロフェッショナル>

ネジ式になっていますので、取り外す際は反時計回りにイヤープースを回してください。取り付ける際は時計回りに回し、最後までしっかりと固定してください。

<カーディオロジー(シングル)>

取り外す際はイヤープースを掴み、引き抜く様にして耳管から外してください。取り付ける際はイヤープースを耳管に押し込み、しっかりと深く差し込んでください。

【ダイヤフラム交換方法】

- (1) ダイヤフラム面側からダイヤフラムリングを指でつまみ、チェストピースに沿って外します。外したリングからダイヤフラムを取り外してください。



- (2) 新しいダイヤフラムをダイヤフラムリングの溝に差し込みます。ダイヤフラムがしっかりとハマっているかを、リングの外側を指で右図の様にさき、軽く曲げてみることで確認してください。



- (3) ダイヤフラムを取り付けたリングをチェストピースに取り付けます。リングの縁の一部をチェストピースに差し込み、親指で押さえながら全体的に取り付けていきます。

- (4) チェストピースにダイヤフラムとリングがしっかりとハマっているかを確認してください。

取扱上の注意

- ・汚れが乾燥し落ちにくくなるため、本品が汚れた時は、直ちに柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、アルコールやうすめの石鹸水で湿らせた布で汚れを落とした後、乾拭きしてください。
- ・故障したときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

製品一覧表

品名	品番	仕様
バイタルナビ聴診器 (カーディオロジー (シングル))	7-3441-01	本体 VNC01 ブラック
	7-3441-11	交換用ダイヤフラム
	7-3441-12	交換用ソフトシーリンググイヤーピース(2個入)
	7-3441-13	交換用ダイヤフラムリング
バイタルナビ聴診器 (プロフェッショナル)	7-3440-※	本体VNP01~05
	7-3440-11	交換用ダイヤフラム
	7-4972-※	交換用ソフトシーリンググイヤーピース(2個入)
	7-4973-※	交換用ダイヤフラムリング
	7-4974-※	交換用ベルリング

※色によって品番が変わりますので、下記コード表を参照ください。

カラーコード表 (プロフェッショナル)

コード	-01	-02	-03	-04	-05
色	ブラック	ネイビー	セイルブルー	ピンク	レッド

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づき正常な使用状態での故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL. _____
取扱い店名	担当者印 _____
住所	TEL. _____

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@soas-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2017年8月初版作成